



🏠 [Arcus-vita](#): Geir: 92601736

MASTERTURNER

HUSKELISTE:

- **Fest underlaken.** Klaffene under madrassen (NB: merk side som skal på hodedelen)
- **Legg på MASTERTURNER.** (NB: merk side som skal på hodedelen)
- **Klaffene i midten kan tas vekk for å oppnå antiskli effekt.**
- **Klaffen i midten kan rulles litt inn for å få større sitteflate med antiskli** når pasient sitter på kanten. **HUSK: Ta den tilbake før forflytning!**
- **Ha gjerne lakenet litt skeivt som utgangsposisjon.** –
Slik det blir liggende rett når bruker er plassert i seng
- **Rett lakenet underveis om det krøller seg.**
- **Når hjertebrettet er oppe, bruk stroppene.**
Festes i sengebunn og Masterturner.
- **Når pasienten ligger flatt skal stroppene av.**
De kan bare bli hengende i sengebunnen

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er spørsmål!