





Hurtigmanual OmniReader

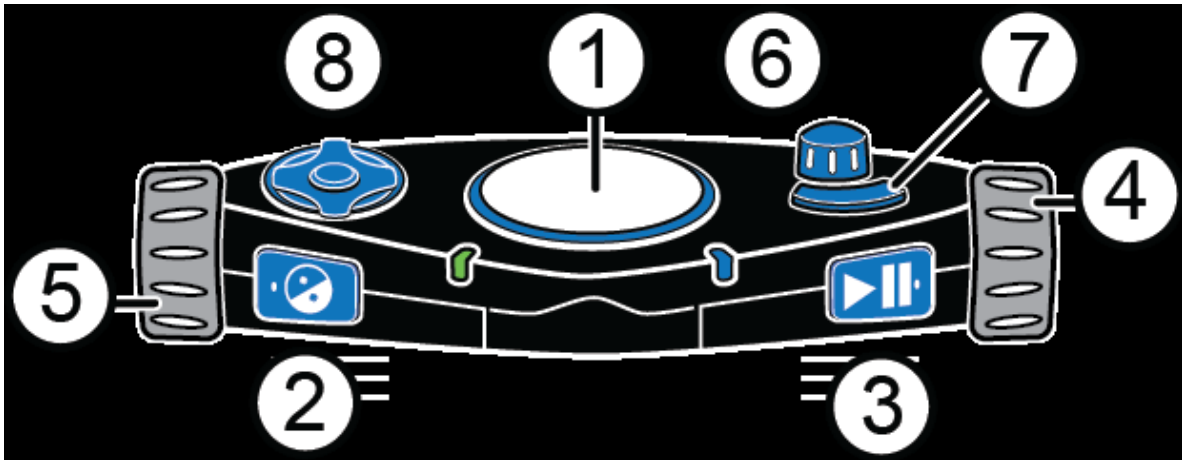

1  Skanneknapp: Stort rund knapp plassert midt på. Trykk for å skanne dokument.

2  Kontrastknapp: Firkantet knapp plassert til høyre for venstre skrollehjul og under Navigasjonsknapp. I menyer vil denne flytte deg tilbake ett steg av gangen
Svaksyntprofil: Endrer farge på tekst (på skjerm).
Blind Profil: Bytter lesestemme når du leser.

3  Spill/Stopp knapp: Firkantet knapp plassert til venstre for Høyre skrollehjul og under modusknapp. Starter, Pauser eller stopper opplesing. I meny for å gå framover eller velge aktuelle element.

4 **Høyre skrollehjul** Plassert på enhetens høyre side. Vri den for å skrolle opp eller ned i meny eller et dokument.

5 **Venstre skrollehjul** Plassert på enhetens venstre side.
Svaksynt profil: Vri for å Zoome inn eller ut tekst på skjermen.
Blind profil: Vri for å endre lesehastig under lesing.



6 Volumknapp:

Høy rund vri knapp plassert til høyre side og med to funksjoner. Vri for volum. Trykk for å komme inn i menyen.



7 Modusknapp:

Avlang buet knapp plassert foran volum vri knappen på høyre side.

Svaksyntprofil: Bytte mellom det som kalles Live bilde og det aktuelle menyelement eller dokument.

Blind profil: Trykk for å slå Tabellmodus av eller på.



8 Daisy knapp:

Rund knapp med retninger plassert ved på venstre side. Trykk på senter for å høre batteristatus når du er i dokumentvisning. Trykk på senterknapp for å slå av eller på LED lys når du er i Live bilde modus. Trykk de andre knappene (retningene) for å navigere opp, ned, høyre eller venstre gjennom menyer, innstillinger, bøker eller dokumenter.

Flere funksjoner, se side 25 i Manualen.

NB: Rundt den Store runde skanneknappen er den lampe som lyser ved forskjellige anledninger. De forskjellige lyssignalene er som følger:

Grønn – pulserende: Enheten slår på eller våkner fra hvilemodus

Blå – fast lys: Klar til å skanne en side eller bok

Blå – rullerende mot klokken: Opptatt å behandle et dokument

Cantec AS

Sofiemyrveien 4

1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

Post@cantec.no