
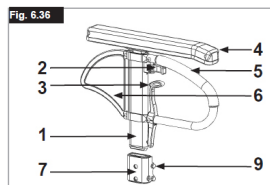


## Bruk av rullestolen

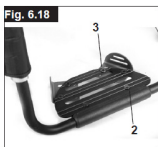


1. Utdvendige armlønskinner
2. Utløsergreb til høydejustering
3. Utløsningsstang
4. Armlønspute
5. Støttstang til overførsel
6. Sidestykker
7. Modtager
8. Justeringsbøjle
9. Dele til justering af holderen
10. Spændeskruer

### Justere benstøtten

Ved å skru opp skruen (1), kan du justere lengden på benstøtten slik at den passer lengden på leggene dine. Stram til etter justering. Vinkelen på benstøtten kan justeres individuelt ved å løsen på skruene (2). Sidekanten (3) på benstøtten forhindrer at føttene dine sklir av benstøtten. Kontroller at alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment) (Fig. 6.17 - 6.18).

### Justering av armlen

Montering: Putt de utvendige armlønskinnene ned i holderen på rammen. Armlenet låses automatisk på plass. Høydejustering: Utløsermekanismen brukes til høydejustering og dreies frem til sitt stoppunkt. (2) Armlønsputen settes opp eller ned til ønsket høyde og utløsermekanismen låses. Trykk ned armlønsputen så den låses på plass med et klikk (4) Ta av armlenet: Trekk i låseknappen (3), og løft hele armlenet av. Sette på armlenet: Dytt armlenet ned.

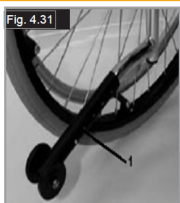

### Tippesikring

Tippesikringene (1) gir ekstra sikkerhet for nybegynner mens de fortsatt lærer å bruke rullestolen. Tippesikringene (1) forhindrer at rullestolen tipper bakover.

Tippesikringene (1) kan flyttes nedover ved å skyve på dem. De kan i tillegg svinges forover. Det skal være en avstand på 3 - 5 cm mellom tippesikringene og bakken. Du må svinge tippesikringene forover når stolen skal kjøres opp eller ned fra høye hindringer (slik som en fortauskant) for å forhindre at de berører bakken.

### Hurtigkobling drivhjul

Trykk inn knappen i midten av drivhjulet for å ta av eller sette på hjulet.

⚠ Sjekk at hjulet er skikkelig festet ved å påse at knappen spretter ut ca 5 mm når hjulbolten er helt inne i hylsen.

### Krasjtestet

Rullestolen kan benyttes som passasjer sete i bil, og er testet og godkjent henhold til ISO 7176-19.

📖 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
T: 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.sunrisemedical.no

## MANUELL RULLESTOL



# QUICKIE®

## Life T

## HURTIGMANUAL

Når du mottar rullestolen

\*Bilder og utstyr kan avvike noe fra standard utførelse



Rullestolen leveres i setebredder i intervaller 28-50 cm og setedybde 32-46 cm. Kontroller at rullestolen du har mottatt har korrekte mål i henhold til din bestilling. Angivelse av rullestolens mål finner du avmerket på krysset, under setet.



Rullestolen leveres komplett.  
Fold ryggen opp dersom den er lagt ned.


Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at den ligger rett vei og riktig på setetrekket. For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk rullestolen.

Quickie Life T kombinerer kvalitet og lettvekt med elegant design.

De avtakbare benstøttene og mulighet for ekstremt lav setehøyde, gjør Life til en klar favoritt blant terapeuter, og personer som bruker bena for framdrift.

Quickie Life T er konstruert for brukere med forskjellige behov, og tilpassingsmulighetene er mange i denne kompakte stolen som også er favoritt hos de som er mye på farten.

De mange størrelse og fargealternativene gjør at stolen kan passe til den smale tenåring, og den store voksne.

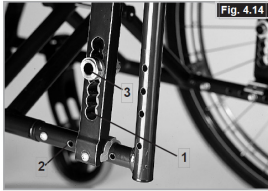

#### Drivhjulbraketter



Plasseringen av kroppens tyngdepunkt i forhold til bakhjulene er vesentlig for at rullestolen skal være lett og komfortabel å bruke. Flere stillinger kan brukes: Ved å flytte drivhjulbraketter (1) bakover langs hullene i rammen (2), vil stolen gjøres mer stabil men tyngre å bruke. Det samme gjelder dersom drivhjulbraketter plasseres lenger forover. Setehøyden kan justeres ved å flytte akselhylsen (3) på akselplaten. Pass på at alle skruene er forsvarlig strammet når justeringen er fullført (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment).

Det kan være nødvendig å justere både bremsene og svinghjulene på nytt.



#### Justering


For å justere bremsen, løsne skruene (1) og monter bremsen på et sted hvor den vil virke på riktig måte. Pass på at avstanden mellom hjulene og bremsene er i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene. For å stille inn den korrekte avstanden, løsne på skruen. Stram deretter skruen på nytt.

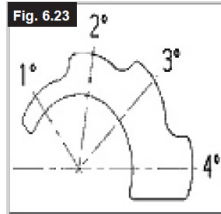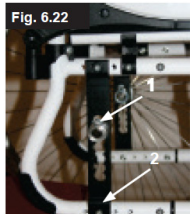

#### Camber (Fig. 6.22 - 6.23)


Stolens cambring kan justeres fra 1° til 4°.

Dette vil øke stolens stabilitet slik at den ikke velter til siden, samtidig som styringen også vil forbedres. Løsne skruene på den perforerte platen (1). Juster deretter adapteren (2) til ønsket vinkel. Stram så skruene til på nytt (se avsnittet om dreiningsmoment). Stolens bredde vil økes ved å stille inn cambringsvinkelen (hver grad øker stolens bredde med ca. 1 cm).

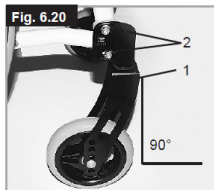

#### Svinghjul, svinghjulsfester og gafler (Fig. 6.20)

Svinghjulsfestene må tilpasses og bremsene kontrolleres hver gang drivhjulene har blitt justert. Kontroller stillingen på svinghjulsadapteren (1) ved å sette en rettvinklet trekant ved siden av den, og se på den forfra. Kontroller at adapteren er i rett vinkel i forhold til gulvet. Ved å skru opp skruene (2) og flytte adapteren, kan du rejustere hjulene til sin optimale stilling ved å justere de korresponderende tannsegmentene. Kontroller at alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering.

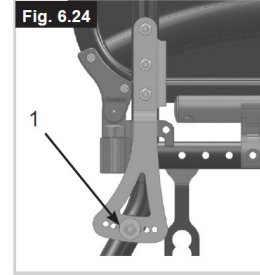

#### Vinkeljusterbar fast rygg (Fig. 6.24)

Ved justering av fast rygg må du løsne bolter "A" på begge sider. Sving festene til ønsket stilling og monter boltene. Dra til.

#### Justerbar velcroygg (Fig. 6.25)

Borrelåsen på den justerbare velcroyggen kan justeres ved å løsne borrelåsene og flytte dem og stramme eller løsne båndene og feste på nytt(1). Gjenta prosessen for hver rem.



#### Høyderegulerbare kjørehåndtak

Disse håndtakene er festet med to bolter, slik at de ikke plutselig sklir ut. Kjørehåndtakene kan justeres ved bruk av utløerspaken (1) for å dekke forskjellige behov. Du vil høre låsemekanismen når du flytter spaken. Du kan nå lett plassere kjørehåndtaket i den stillingen du ønsker. Mutteren (2) på strammespaken bestemmer hvor stramt kjørehåndtakene er festet på plass. Dersom mutteren er løs når strammespaken har blitt justert, vil også kjørehåndtaket være for løst. Vipp kjørehåndtaket fra side til side før bruk, for å forvisse deg om at det er festet godt på plass.


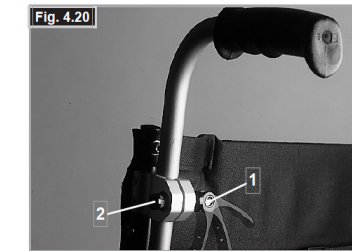


Fig. 6.42

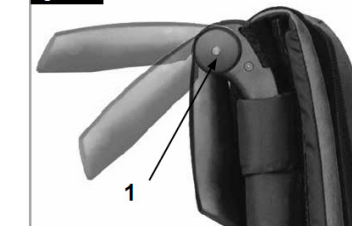

#### Nedfellbare kjørehåndtak (Fig. 6.42)

Hvis kjørehåndtakene ikke brukes, kan de foldes sammen ved å trykke på knappen, (1). Når de igjen skal brukes, kan de enkelt løftes opp inntil de klikker på plass.