

SLIK FUNGERER TIDEWAVE VENDEMADRASS



Vendefunksjon: velg vending til begge sider (standard) eller én side.



Grad av vending: 15, 20 (standard) eller 30°.



Pause på sidene ved vending: Kontinuerlig vending, 15 min pause (standard) eller 30 min pause.




Vendehastighet: sakte, medium (standard) eller hurtig



Start/Pause (stellefunksjon). Trykk for å starte vendeprogrammet. Trykk igjen for å pause programmet for å f.eks. stille pasienten (sette i gang stellefunksjonen). Madrassen blir da flat og starter opp igjen etter 30 min. Ved kortere pause, trykk Start og vent til madrassen slipper ut luft og starter opp igjen automatisk. Trykk Stopp etter endt bruk. **Statisk grønt lys betyr vendeprogram kjører. Blinkende grønt lys betyr vendeprogram på pause.**



Rødt lys betyr teknisk feil. Sjekk hurtigkobling (HLR). Ta inn/ut kontakt, vent 15 min og forsøk omstart.

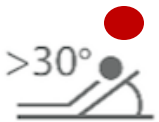

Rødt lys betyr at hjertebrettet må senkes til 30° eller mindre. Madrassen vil stoppe ved rødt lys. Hjertebrettet kan heves som et middel for å stoppe madrassen. Senk igjen for å starte opp igjen automatisk.



Akutt situasjon? Trykk inn den røde HLR-knappen slik at all luft slippes av madrassen. **Vent 10 min før du starter opp igjen.**



Har du spørsmål eller mistenker teknisk feil? Ta inn/ut støpsel og/eller slå av/på madrassen. Kontakt Bardum AS på 64 91 80 60 dersom det ikke fungerer, eller ring din kontaktperson.



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no