

OptiCell Soft Plus Jr.

MADRASS-ID:

OPPSTART

1. Plasser madrassen ovenpå en standard skummadrass eller tilsvarende, og heng pumpen i fotenden.
2. Pumpen tilkobles et eluttak og luftslangene fra madrassen.
3. Start pumpen (på-knappen finnes der strømforsyningen er festet).
4. Når Ready-lampen lyser kan madrassen tas i bruk.



READY LAMPE Når denne lampen lyser er madrassen klar til bruk.



KEY LOCK

Trykk og hold inne i 5 sekunder for å deaktivere.



MUTE LYD-ALARM

Trykk for å slå av lyd-alarmen.



LAVERE PASIENTVEKT

Senker det vektnivået madrassen skal tilpasse seg.



ALARM FOR LAVT LUFTRYKK

Lampen aktiveres ved for lavt lufttrykk.



HØYERE PASIENTVEKT

Øker det vektnivået madrassen skal tilpasse seg.



ELEKTRISK FEIL

Lampen aktiveres ved feil på strømforsyning.



STELLFUNKSJON

For å aktivere stellfunksjon.

ON/OFF-KNAPP PÅ PUMPENS HØYRE SIDE 