

# Hurtigguide



## Automatisk trykkregulering

- Stiller inn madrassen automatisk basert på pasientens vekt.
- LED-lys blinker fra venstre til høyre når prosessen kjører.
- Venstre LED-lampe lyser permanent ✓ når prosessen er fullført.



## Lydløs alarm og panellås

- Midlertidig dempet alarm. Gjenopptas hvis situasjonen ikke er løst innen 3 minutter.

🔒 Trykk i 3 sekunder for å låse opp eller låse kontrollpanelet. Låser seg automatisk når den ikke er i bruk innen 5 minutter.



## Fininnstillinger

- Fininnstill det automatiske forhåndsstilt trykket.
- 3 innstillingsnivåer:

- 0 Auto = forhåndsinnstilt trykk
- Et nivå lavere enn forhåndsinnstilt trykk
- + Et nivå høyere enn forhåndsinnstilt trykk



## Terapi-modus

Velg en bestemt funksjon: Trykk kontinuerlig på terapiknappen for å velge ønsket funksjon.



### Max Firm

Fast og statisk overflate for pleieoppgaver og pasientforflytninger.



### Statisk

Oppblåste celler med lavt trykk (ikke-siftende).



### Vekseltrykk





Fyller og tømmer luftcellene med jevne mellomrom i 10 min sykluser.



### Seteoppblåsing

Ekstra støtte for pasienten i vertikal stilling.

# Alarmguide

<b>Lavt trykk</b>	LED-lys viser at trykket er for lavt 
<b>Årsak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Løs CPR-stropp</li><li>• Skadet luftcelle</li><li>• Problem med slangemontering</li></ul>
<b>Løsning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stram CPR-komponenten</li><li>• Sjekk for mulig lekkasje i madrassen</li><li>• Kontroller og koble til slangene igjen</li></ul>
<b>Strøbrudd</b>	LED-lys indikerer strøbrudd 
<b>Årsak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingen strømforsyning</li><li>• Sikringen har gått</li><li>• Feik med elektroniske komponenter (PCBA)</li></ul>
<b>Løsning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk strømninggangen</li><li>• Skift sikring</li><li>• Skift ut hoved-PCBA</li></ul>
<b>Service</b> Tid for periodisk ettersyn	En grønn lampe lyser ved siden av servicesymbolet 
<b>Årsak</b>	Mekanisk feil
<b>Løsning</b>	Kontakt Varodd Velferdsteknologi
<b>Nødsituasjon</b> Hjertestans, HLR	Trekk i CPR-merket som er på toppen av madrassen på pasientens høyre side 
<b>Løsning</b>	CPR-stroppen frigjøres for hurtig tømning av madrassen. Pumpen kobles fra madrassen for fremskynde tømningen.