

Hurtigguide for Earis Premium lyttesystem

- Earis mottakere parres automatisk med Earis sender når mottakeren plasseres i sender
- Lydprofil (tonekontroll) velges på sender (1-5) eller via knapp på mottaker. Valg av lydprofil sikrer at brukeren får den best mulige taleforståelse og lytteopplevelse.
- Earis halsslyngemottaker slås av/på med knapp på lommeseender
- Earis bøylemottaker slås automatisk på
- 2 stk Earis mottakere kan være koblet til sender samtidig
- Vendebytter på Earis sender må settes i posisjon etter valgt type tilkobling til lydkilde (optisk eller analog)
- Earis lommemottaker kan benyttes sammen med hodetelefoner

Servicetelefon for Earis Premium og Swing lyttesystemer: 91614613