

iGrid 10 – kom i gang

— Innholds- fortegnelse

01 Innhold

02 Slå på / av

Dvale

Volum

Lading

03 Starte Grid for iPad

04 Nyttige innstillingsområder

05 Åpne og lukke programmer

06 Kontoer

07 Bærestropp

08 Support og kontaktinfo

01 Innhold

Dette finner du i pakken som blir levert fra Cognita:

- 10" iPad montert i solid etui
- Bærestropp
- Ladekabel
- Bruerveiledning

02 Slå på/ av

Slå på enheten

Når du skal slå på enheten, trykker du på og holder nede av/påknappen i 3 sekunder.

Slå av enheten

Når du skal slå av enheten, trykker du på og holder nede av/ på-knappen i 3 sekunder. Skyv deretter knappen 'Slide to Power OFF'-bryteren på skjermen for å slå av enheten.

Trykk på X for å avbryte avslåingen.

Dvale

Hvilemodus er tilstand med lavt strømforbruk der enheten er inaktiv og skjermen er av. Trykk på av/på-knappen for å sette enheten i dvalemodus. Trykk på av/på-knappen igjen for å aktivere enheten.

Volum

Volum endres ved å justere på lyd opp og ned på enhet




Lading

iGrid bør lades jevnlig, benytt medfølgende lader. Ladeinngang er plassert i bunn rett under iPadens hjem-knapp. Det er best å lade enheten når den ikke er i bruk

03 Starte Grid for iPad

For å starte applikasjonen Grid for iPad trykk raskt på ikonet Grid på skjermen.

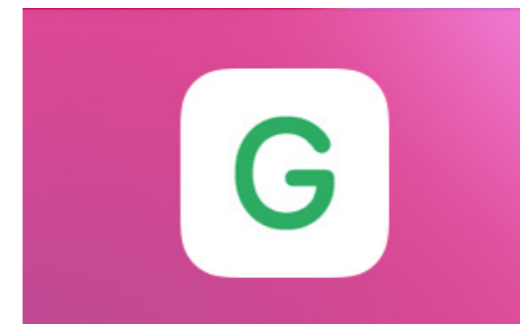

For ytterligere informasjon om programvaren Grid for iPad henvises det til den medfølgende Grid for iPad veiledning /FAQ.


04 Nyttige innstillinger

For å gjøre innstillinger på din enhet trykker du på ikonet med tannhjulet



Wi-fi

Koble til internett og administrer nettverk.

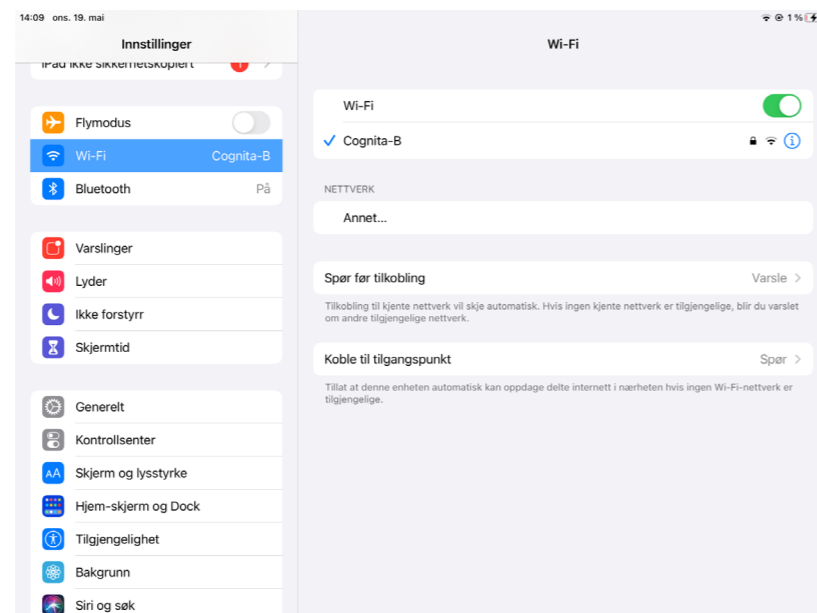

Generelt

Finn ut mer om iPad.

Skjerm og lysstyrke

Juster hvor lys skjermen er, veksle mellom lys- og mørk-modus og justere tekststørrelsen.

Noen innstillinger kan slås av og på. Trykk "Bytt" ved siden av innstillingen for å veksle mellom dem

05 Åpne og lukke programmer

Åpne og lukke programmer

Hvis du vil åpne et program, trykker du på ikonet for det. Programmet åpnes. Når et program åpnes, fyller det skjermen

Lukke igjen et program

Hvis du vil lukke et program og gå tilbake til hjem-skjermen, trykker du én gang på Hjem-knappen.

06 Kontoer

Enheter er levert med programvaren Grid for iPad, dokumentasjon medfølger derfor i eget dokument.

Ta vare på dette da det er et verdifullt dokument.

Dersom man angir kode på iPad eller velger å benytte tofaktorautorisering eller lignende er det viktig at man tar vare på denne informasjonen og fjerner det før evt. innsendelse for reparasjon.

07

Bærestropp

Bærestroppen festes ved å klippe den fast på enheten.

For ytterligere informasjon, se brukerveiledning for programvaren Grid for iPad.

08

Support og kontaktinfo

Kontakt Cognita AS ved behov for support eller veiledning. Kontaktinfo står nederst på siden.

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support
Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Post- og besøksadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru