

# Hurtigguide Compact 6 HD **Speech**



**Compact 6 HD open**



**Compact 6 HD closed**

Compact 6 HD plasseres i lesestativet som kan være åpnet eller lukket. Apparatet har to kameraer, ett nær-kamera og ett avstands-kamera. Når stativet er åpnet vil nær-kamera automatisk slå seg på, og når stativet er lukket vil avstands-kameraet aktiveres.



**MAGNIFIER**



**OVERVIEW**

## Easy Mode



Zoom ut

Endre farge

Zoom inn

## Advanced Mode



Meny

Klokke/dato

compact 6 HD leveres med Easy Mode som standard. Dersom du ønsker å bruke Advanced Mode, vennligst se brukermanualen for informasjon. I Easy Mode kan du, endre forstørrelse, endre farger, bytte mellom nær- og avstands-kamera, og ta bilde (snapshot).



Ta bilde  
(Snapshot)

USB kabel  
tilkobling

## Opplesningsfunksjon

Dersom du har en Compact 6 HD Speech med tekst til tale (OCR) funksjon, vil denne funksjonen aktiveres når du tar et bilde ved hjelp av Snapshot-knappen. Plasser apparatet på den teksten du ønsker opplest, og trykk på knappen. Teksten vil nå vises på skjermen, og bli lest opp høyt. Bruk Play/Pause-knappen for å starte og stoppe opplesningen. Bruk den medfølgende USB kabelen for å lade apparatet. Det tar ca 2 timer å lade batteriet fullt.



Battery full



Battery charging



Battery almost empty