

AV/PÅ

Trykk på Av/på knappen i ca. 3 sekunder for å slå på Luna 8. Man slår av Luna 8 på samme måte.

LØSE UT STATIVET OG ZOOM

Løs ut foten ved å trykke inn frigi knappen i midten nede, bak skjermen. Sett Luna 8 på det du skal lese. Trykk Zoome inn for å øke forstørringen. Trykk Zoome ut for å minske forstørringen.



KUNSTIGE FARGER

Trykk fargevalg for å bytte mellom kunstige farger. Ved å fortsette å trykke kommer du rundt tilbake til fargemodus.

FRYS FUNKSJON

Trykk Frys for å fryse bildet. Trykk engang til for å løse opp.

Se bruksanvisning for flere funksjoner