

Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Zip




- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 På/av med LED | 4 Høykontrastmodus |
| 2 Forstørrelseskontroll (+/-)
Trykk gir oversiktsmodus | 5 Lysstyrkekontroll (+/-) |
| 3 Bildemodus (farger/gråskala) | |

Avanserte innstillinger:

Se baksiden

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon 22 69 61 00 hvis du trenger hjelp med produktet.

Meny innstillinger

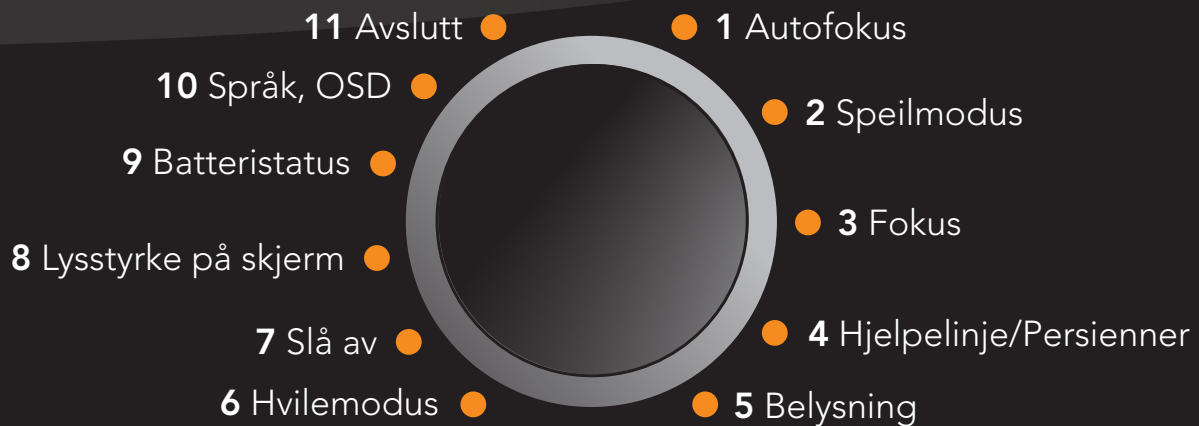

Bytt mellom enkel og avansert modus:

- Trykk og hold inne knapp 4
- Trykk og hold inne knapp 3
- Trykk på knapp 5
- Slipp knappene samtidig*

Vent minst i 5 sekunder og trykk på knapp 5 for å åpne menyen.

1 Autofokus (AF-ON/AF-OFF vises)

Trykk knapp 5 for å slå autofokus av og på.

2 Speilmodus (MIRROR vises)

Trykk knapp 5 for å speilvende bildet.

3 Fokus (FOCUS vises)

Trykk og vri knappe 5 for å endre fokus manuelt. Trykk igjen for å gå tilbake.

4 Hjelpelinje/Persienner (REF LINE vises)

Trykk og vri knapp 5 for å velge mellom hjelpelinjer og persienner. Trykk og vri for å velge plassering og størrelse. Trykk igjen for å gå tilbake.

5 Belysning (LAMP vises)

Trykk og vri knapp 5 for å justere lysstyrken på LED-lyset. Trykk igjen for å gå tilbake.

6 Hvilemodus (SLEEP vises)

Trykk og vri knapp 5 for å velge ønsket tid før systemet går i hvilemodus. Trykk igjen for å gå tilbake. Bevegelse under kameraet vil automatisk starte systemet.

7 Slå av (SH-OFF vises)

Som punkt 6, men systemet slår seg helt av.

8 Lysstyrke på skjermen (SCREEN vises)

Trykk og vri knapp 5 for å justere lysstyrken på skjermen. Trykk igjen for å gå tilbake.

9 Batteristatus (Batterisymbolet vises - for modeller med innebygget batteri)


Trykk på knapp 5 for å se batterinivå.

10 Språk (OSD vises)

Trykk og vri knapp 5 for å velge ønsket språk (ENG-Engelsk, DEU-Tysk, FRA-Fransk, SPA-Spansk).

11 Avslutt (EXIT vises)

Trykk knapp 5 for å gå ut av menyen.

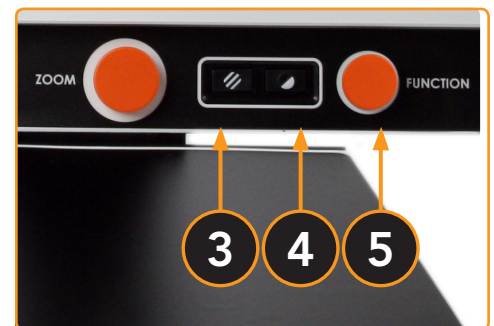

* Bruk samme fremgangsmåte for å gå tilbake til enkel modus.