


Hurtigmanual, kontrollpanel


MagniLink Vision Basic, 3 skru

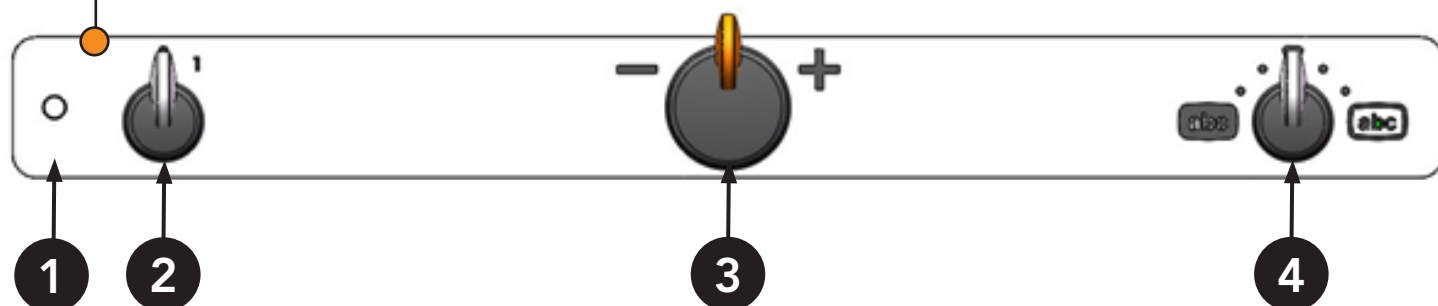

- 1** LED-indikator
- 2** Av/på
- 3** Forstørrelsekontroll (+/-)
- 4** Fargebilde/Høykontrastmodus

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon 22 69 61 00 hvis du trenger hjelp med produktet.

Hurtigmanual, X/Y-bord MagniLink Vision

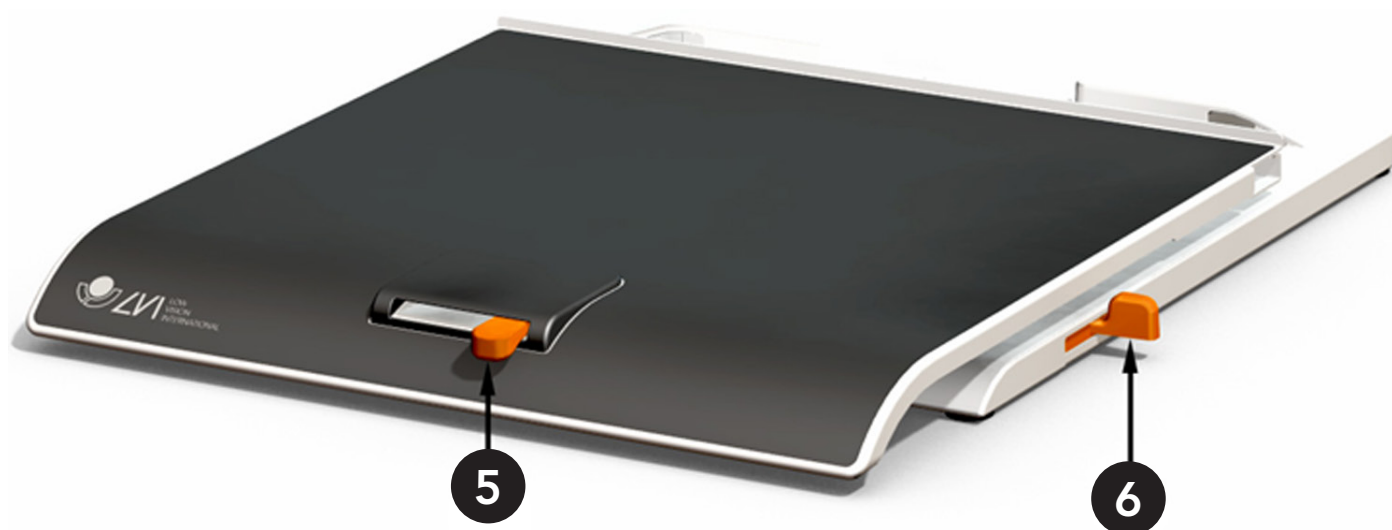

5 Sidejustering

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen.

6 Dybdejustering

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen.