


# Hurtigmanual, extern kontrollpanel

## MagniLink S

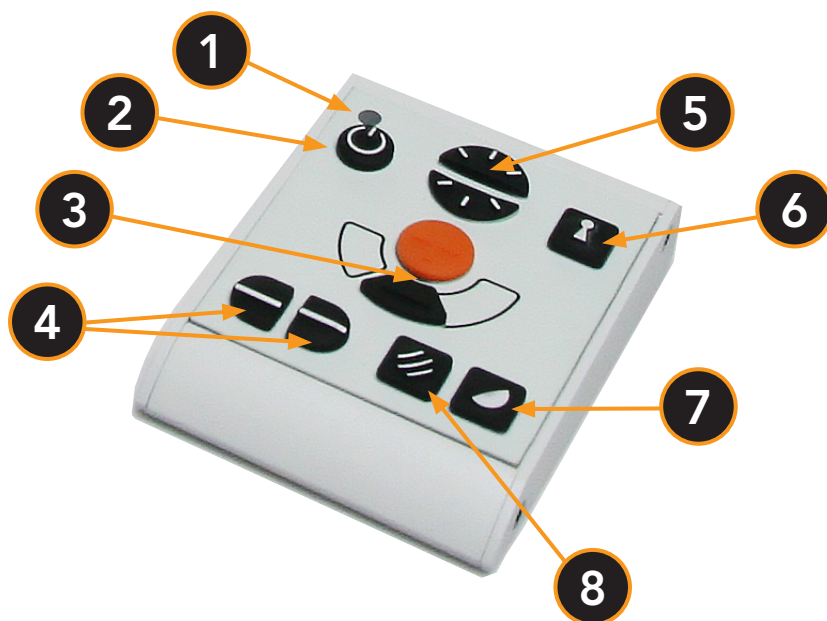

### 1 LED

Grønn lampe: enheten er på.  
Blinkende grønt : systemet starter.  
Blinkende gult: standby. Blinkende rødt: Noe er galt med systemet.

### 2 Strøm av/på

Trykk for å starte eller slå av systemet.

### 3 Zoomekontroll

Når du skal redusere zoomen, trykker du på den nedre knappen (minus). Når du skal øke zoomen, trykker du på den øvre knappen (pluss).

### 4 Referanselinje

Høyre knapp for å flytte den horisontale linjen nedover. Hold knappen inne for å gjøre referanselinjen vertikal og flytte den til venstre. Venstre knapp gir motsatt resultat.

### 5 Lyskonfigurering

Trykk på den øvre halvdelen for å øke lysnivået og på den nedre for å redusere det.

### 6 Autofokus av/på

Trykk én gang på knappen for å låse fokus. Trykk en gang til for å aktivere autofokus igjen.

### 7 Høykontrastmoduser med kunstige farger

Trykk på knappen for å veksle mellom de ulike fargekombinasjonene.

#### Rotasjon

Du kan rotere bildet 180 grader ved å holde knappen nede i tre sekunder.

### 8 Bildemodus

Trykk på knappen for å veksle bildemodusen mellom naturlige farger og gråskala.

Lær mer om våre produkter på [www.provista.no](http://www.provista.no).

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.