


# Hurtigmanual, tastatur

## MagniLink PRO Skole Air

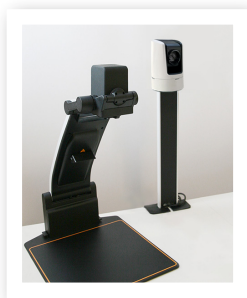

De fleste funksjonene kan håndteres via tastaturet. Snarveikommandoene kan endres i innstillingene. Nedenfor ser du standardinnstillingene for snarveikommandoene. Du får også tilgang til funksjonene via menyen i selve programvaren.

F1	Naturlige farger	Ctrl + R	Roter bilde medurs
F2	Positive farger forover	Ctrl + Shift + R	Roter bilde moturs
Shift + F2	Positive farger bakover	Ctrl + I	Gjenspeil kamerabilde
F3	Negative farger forover	Ctrl + F	Fryse kamerabilde
Shift + F3	Negative farger bakover	Ctrl + A	Alltid øverst
Pil opp	Øke forstørrelsen	Ctrl + H	Skjul menyer
Pil ned	Redusere forstørrelsen	F12	Åpne brukerveiledning
Ctrl + O	Oversiktsmodus	F9	Innstillinger
C	Bytt kamera	F11	Standardinnstillinger
X	Bytt split modus	F7	Endre kameraoppløsning
Ctrl + 1	Lagre posisjon 1	Ctrl + C	Kopier bilde eller tekst
Ctrl + 2	Lagre posisjon 2	Ctrl + M	Minimer applikasjon
Ctrl + 3	Lagre posisjon 3	F8	Neste delt modus
Shift + 1	Gå til posisjon 1	Ctrl + F8	Forrige delt modus
Shift + 2	Gå til posisjon 2	Ctrl + Minus	Reduser menystørrelse
Shift + 3	Gå til posisjon 3	Ctrl + Pluss	Øk menystørrelse
Shift + pil venstre	Flytt split venstre/opp	F5	Lagre bilde
Shift + pil høyre	Flytt split høyre/ned	Shift + F5	Lagre bilde raskt
Ctrl + J	Autofokus av/på	F6	Åpne bilde
Shift + pil opp	Reduser fokusavstand	Shift + F6	Åpne bilde raskt
Shift + pil ned	Øk fokusavstand	Ctrl + F5	Start videoopptak
Pil høyre	Øk lysstyrke/kontrast	Ctrl + Shift + F5	Start videoopptak raskt
Pil venstre	Reduser lysstyrke/kontrast	Ctrl + F6	Åpne video
Ctrl + pil venstre	Referanselinje venstre/opp	Ctrl + Shift + F6	Åpne video raskt
Ctrl + pil høyre	Referanselinje høyre/ned	A	Panorer kamera til venstre
Ctrl + 6	Reduser lampelysstyrke	D	Panorer kamera til høyre
Ctrl + 7	Øk lampelysstyrke	W	Panorer kamera opp
		S	Panorer kamera ned

Lær mer om våre produkter på [www.provista.no](http://www.provista.no).

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.

# Hurtigmanual, tastatur

## MagniLink PRO Skole Air



Følgende kommandoer er bare tilgjengelige sammen med kameraer som er lisensiert for OCR. Du får også tilgang til funksjonene via menyen i selve programvaren.

<b>F4</b>	<b>Start OCR</b> Teksten fra OCR-behandlingen erstatter eksisterende tekst.	<b>N</b>	<b>Stillemodus</b>
<b>Shift + F4</b>	<b>Start OCR-innsetting</b> Teksten fra OCR-behandlingen settes inn på en ny side.	<b>3</b>	<b>Les forrige</b>
<b>Ctrl + L</b>	<b>Helt bilde</b> Bytter mellom helt bilde og beskåret bilde.	<b>4</b>	<b>Les neste</b>
<b>Ctrl + V</b>	<b>Lim inn</b> Den innlimte teksten erstatter eksisterende tekst.	<b>5</b>	<b>Bytt lesemodus</b>
<b>Ctrl + Skift + V</b>	<b>Lim inn og legg til</b> Den innlimte teksten legges til på en ny side.	<b>Page Down</b>	<b>Neste page</b> Hvis flere sider er skannet, går du til neste side.
<b>Ctrl + S</b>	<b>Kolonnevelger</b> Aktiverer eller deaktiverer kolonnevelgeren. Når kolonnevelgeren er aktivert, OCR-behandles kolonnene som er valgt av kolonnevelgeren.	<b>Page Up</b>	<b>Forrige side</b> Hvis flere sider er skannet, går du til forrige side.
<b>V</b>	<b>Bytter mellom kamerafane og OCR-fane</b>	<b>Slett</b>	<b>Fjern den aktuelle siden</b> Hvis flere sider er skannet, fjerner du den aktuelle siden.
<b>Alt + F5</b>	<b>Lagre dokumenter</b>	<b>8</b>	<b>Reduser volum</b>
<b>Alt + F6</b>	<b>Åpne dokumenter</b>	<b>9</b>	<b>Øk volum</b>
<b>Pil opp</b>	<b>Øke forstørrelsen</b>	<b>6</b>	<b>Reduser talehastighet</b>
<b>Pil ned</b>	<b>Redusere forstørrelsen</b>	<b>7</b>	<b>Øk talehastighet</b>
<b>Skift + Pluss</b>	<b>Øk skriftstørrelse</b>	<b>Ctrl + 0</b>	<b>Neste stemme</b>
<b>Skift + Minus</b>	<b>Reduser skriftstørrelse</b>	<b>A</b>	<b>Panorer til venstre</b> (Hvis dokumentet er forstørret)
<b>1</b>	<b>Start lesing</b>	<b>D</b>	<b>Panorer til høyre</b> (Hvis dokumentet er forstørret)
<b>2</b>	<b>Stopp lesing</b>	<b>W</b>	<b>Panorer opp</b> (Hvis dokumentet er forstørret)
<b>B</b>	<b>Endre visningsmodus</b>	<b>S</b>	<b>Panorer ned</b> (Hvis dokumentet er forstørret)

Lær mer om våre produkter på [www.provista.no](http://www.provista.no).

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.