

Hurtigmanual, tastatur

MagniLink Air Duo



De fleste funksjonene kan håndteres via tastaturet. Snarveikommandoene kan endres i innstillingene. Nedenfor ser du standardinnstillingene for snarveikommandoene. Du får også tilgang til funksjonene via menyen i selve programvaren.

F1	Naturlige farger	Ctrl + I	Gjenspeil kamerabilde
F2	Positive farger forover	Ctrl + F	Fryse kamerabilde
Shift + F2	Positive farger bakover	Ctrl + A	Alltid øverst
F3	Negative farger forover	Ctrl + H	Skjul menyer
Shift + F3	Negative farger bakover	F12	Åpne brukerveiledning
Pil opp	Øke forstørrelsen	F9	Innstillinger
Pil ned	Redusere forstørrelsen	F11	Standardinnstillinger
Ctrl + O	Oversiktsmodus	F7	Endre kameraoppløsning
C	Bytt kamera	Ctrl + C	Kopier bilde eller tekst
X	Bytt split modus	Ctrl + M	Minimer applikasjon
Ctrl + 1	Lagre posisjon 1	F8	Neste delt modus
Ctrl + 2	Lagre posisjon 2	Ctrl + F8	Forrige delt modus
Ctrl + 3	Lagre posisjon 3	Ctrl + Minus	Reduser meny størrelse
Shift + 1	Gå til posisjon 1	Ctrl + Pluss	Øk meny størrelse
Shift + 2	Gå til posisjon 2	F5	Lagre bilde
Shift + 3	Gå til posisjon 3	Shift + F5	Lagre bilde raskt
Shift + pil venstre	Flytt split venstre/opp	F6	Åpne bilde
Shift + pil høyre	Flytt split høyre/ned	Shift + F6	Åpne bilde raskt
Ctrl + J	Autofokus av/på	Ctrl + F5	Start videoopptak
Shift + pil opp	Reduser fokusavstand	Ctrl + Shift + F5	Start videoopptak raskt
Shift + pil ned	Øk fokusavstand	Ctrl + F6	Åpne video
Pil høyre	Øk lysstyrke/kontrast	Ctrl + Shift + F6	Åpne video raskt
Pil venstre	Reduser lysstyrke/kontrast	A	Panorer kamera til venstre
Ctrl + pil venstre	Referanselinje venstre/opp	D	Panorer kamera til høyre
Ctrl + pil høyre	Referanselinje høyre/ned	W	Panorer kamera opp
Ctrl + R	Roter bilde medurs	S	Panorer kamera ned
Ctrl + Shift + R	Roter bilde moturs		

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.

Hurtigmanual, tastatur

MagniLink S Skole Air



Følgende kommandoer er bare tilgjengelige sammen med kameraer som er lisensiert for OCR. Du får også tilgang til funksjonene via menyen i selve programvaren.

F4	Start OCR Teksten fra OCR-behandlingen erstatter eksisterende tekst.	N	Stillemodus
Shift + F4	Start OCR-innsetting Teksten fra OCR-behandlingen settes inn på en ny side.	3	Les forrige
Ctrl + L	Helt bilde Bytter mellom helt bilde og beskåret bilde.	4	Les neste
Ctrl + V	Lim inn Den innlimte teksten erstatter eksisterende tekst.	5	Bytt lesemodus
Ctrl + Skift + V	Lim inn og legg til Den innlimte teksten legges til på en ny side.	Page Down	Neste page Hvis flere sider er skannet, går du til neste side.
Ctrl + S	Kolonnevelger Aktiverer eller deaktiverer kolonnevelgeren. Når kolonnevelgeren er aktivert, OCR-behandles kolonnene som er valgt av kolonnevelgeren.	Page Up	Forrige side Hvis flere sider er skannet, går du til forrige side.
V	Bytter mellom kamerafane og OCR-fane	Slett	Fjern den aktuelle siden Hvis flere sider er skannet, fjerner du den aktuelle siden.
Alt + F5	Lagre dokumenter	8	Reduser volum
Alt + F6	Åpne dokumenter	9	Øk volum
Pil opp	Øke forstørrelsen	6	Reduser talehastighet
Pil ned	Redusere forstørrelsen	7	Øk talehastighet
Skift + Pluss	Øk skriftstørrelse	Ctrl + 0	Neste stemme
Skift + Minus	Reduser skriftstørrelse	A	Panorer til venstre (Hvis dokumentet er forstørret)
1	Start lesing	D	Panorer til høyre (Hvis dokumentet er forstørret)
2	Stopp lesing	W	Panorer opp (Hvis dokumentet er forstørret)
B	Endre visningsmodus	S	Panorer ned (Hvis dokumentet er forstørret)

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.