

# Hurtigmanual, kontrollpanel

## MagniLink S



- 1 LED.** Grønn lampe: enheten er på. Blinkende grønt : systemet starter. Blinkende gult: standby. Blinkende rødt: Noe er galt med systemet.
- 2 Strøm av/på.** Trykk for å starte eller slå av systemet.
- 3 Zoomekontroll.** Når du skal redusere zoomen, trykker du på den nedre knappen (minus). Når du skal øke zoomen, trykker du på den øvre knappen (pluss).
- 4 Referanselinje.** Høyre knapp for å flytte den horisontale linjen nedover. Hold knappen inne for å gjøre referanselinjen vertikal og flytte den til venstre. Venstre knapp gir motsatt resultat.
- 5 Justering av kontrast/lys.** Trykk på den øvre halvdelen for å øke lysnivået og på den nedre for å redusere det. Justere LED-lyd ved å samtidig holde in knapp 8.
- 6 Autofokus av/på.** Trykk én gang på knappen for å låse fokus. Trykk en gang til for å aktivere autofokus igjen.
- 7 Høykontrastmoduser med kunstige farger.** Trykk på knappen for å veksle mellom de ulike fargekombinasjonene.  
**Rotasjon.** Du kan rotere bildet 180 grader ved å holde knappen nede i tre sekunder.
- 8 Bildemodus.** Trykk på knappen for å veksle bildemodusen mellom naturlige farger og gråskala.  
**LED-lys.** Hold knappen nede og juster med knapp 5.  
**Speilbilde.** Hold knappen nede 3 sekunder.

Lær mer om våre produkter på [www.provista.no](http://www.provista.no).

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.