

## **Focus 14, 40, og 80 Blue – 5<sup>th</sup> Generasjon Leselist**

### **Leselist Hurtigstart veiledning**

440957-001 Rev A

## **Introduksjon**

Femte generasjon Focus Blue leselist er en kompakt og taktilt grensesnitt til din datamaskin. Brukt sammen med skjermlesere slik som JAWS® for Windows, vil Focus Blue forbedre bruken av datamaskinen. Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende informasjon som du trenger for å bli kjent med Focus leselisten slik at du kommer igang. For mer detaljert informasjon, se Focus Blue brukerveiledning som ligger på vår ftp og http server.

## **Fysisk beskrivelse**

På venstre side av leselisten, fra fronten til baksiden, finner du en Mikro SD port som inneholder et Micro SD kort, strømbryter, og en USB-C port. USB porten lar deg koble leselisten til datamaskinen med den medfølgende USB kabelen, eller til strøm adapteren.

Cellene på leselisten er mot fronten på enheten. Det er markørhentere over hver enkelt punktcelle. På hver ende av leselisten er det navigasjon vippebrytere som brukes for enkel navigering. Bak hver navigasjon vippebryter er det en Modus knapp som veksler mellom de forskjellige navigerings modusene.

I posisjon rett over markørhenter knappene, er det åtte taster likt som et Perkins punkt tastatur. I posisjon fra midten, inneholder den venstre siden følgende: Punkt 1 under pekefingeren, Punkt 2 under langfingeren, Punkt 3 under ringfingeren, og Punkt 7 under lillefingeren, mens høyre side inneholder: Punkt 4 under pekefingeren, Punkt 5 under langfingeren, Punkt 6 under ringfingeren, og Punkt 8 under lillefingeren. Disse tastene brukes til å skrive inn tekst eller utføre kommandoer. Mellom punkt 1 og 4 er det en meny knapp som brukes til å åpne Focus konfigurasjonsmeny så vel som å vise Focus status informasjon i en aktiv tilkobling. På fronten, direkte under og midt på leselisten er **MELLOMROM**. Denne tasten brukes sammen med punktastene når man angir kommandoer. En kommando som inkluderer **MELLOMROM** er vanligvis referert til som chord kommando. For eksempel, **L MELLOMROM** eller **PUNKT 1-2-3** og **MELLOMROM**.

På fronten av leselisten er følgende tasterr, fra venstre til høyre. Plasseringen på disse kontrollene er noe forskjellige avhengig av type Focus du har.

- **Focus 14:** Venstre valg knapp, venstre vippebryter, venstre panorering, venstre skift knapp, høyre skift knapp, høyre panorering, høyre vippebryter og høyre valg knapp
- **Focus 40:** Venstre panorering, venstre vippebryter, venstre valg knapp, venstre skift knapp, høyre skift knapp, høyre valg knapp, høyre vippebryter og høyre panorering.
- **Focus 80:** Venstre panorering, venstre vippebryter, venstre valg knapp, to venstre panorering vippebrytere, venstre skift knapp, høyre skift knapp, to høyre panorering vippebrytere, høyre valg knapp, høyre vippebryter og høyre panorering

**Merknad:** Den følgende seksjonen beskriver hvordan disse tastene virker når du bruker Focus Blue med JAWS. Hvis du bruker Focus leselist med en tredje-part skjermleser eller en mobil enhet, referer til dokumentasjonen som fulgte med programvaren fordi funksjonen på tastene kan være forskjellige fra JAWS.

## Navigasjonsbrytere og Modusknapper

Focus Navigasjonsbrytere lar deg flytte raskt gjennom filer, dialogbokser, lister og menyer. I en fil kan du flytte linje for linje, setning for setning, avsnitt for avsnitt eller panorere fremover og bakover. For å bytte mellom de fire navigasjonsmodusene, trykk på modusknappen som finnes rett over Navigasjonsbrytere. I en dialogboks kan du flytte mellom de tilgjengelige kontrollene og også bruke dem. I en meny kan du flytte opp og ned gjennom menyvalgene. Du kan også slå av Navigasjonsbryterne ved samtidig trykke **Venstre** eller **Høyre modusknapp** og **MELLOMROM**. Trykk **Venstre** eller **Høyre modusknapp MELLOMROM** en gang til for å slå dem på igjen.

## Panoreringsknapper

Focus panoreringsknappene flytter til venstre eller høyre en listlengde hver gang du trykker på dem. Trykk på venstre panorering, knappen med et dobbel uthevet pil venstre symbol for å panorere til venstre; trykk på høyre panorering, knappen med et dobbel uthevet pil høyre symbol for å panorere til høyre. Hvis du bruker JAWS, kan funksjonen for panorering bli reversert slik at å trykke den **venstre panorering** kan få Focus listen til å panorere til høyre og trykk på **høyre panorering** kan få den til å gå til venstre. For å slå på reversert panorering, åpne JAWS Settings Senter, søk etter "reversert panorering", og velg Reversert panorering avkryssing boks.

## Vippebrytere

Vippebryterne gjør at man kan flytte en linje opp eller ned. Trykk på toppen av vippebrytere for å flytte opp en linje; trykk nedre del av vippebrytere for å flytte ned en linje. Vippebryterne i kombinasjon med panoreringsknappene flytter til starten eller slutten av linjen som markøren er plassert på. Trykk en panoreringsknapp og øverst på vippebryteren for å gå til begynnelsen av linjen. Trykk en panoreringsknapp og nederst på vippebryteren får å gå til slutten av linjen.

## Valg knapper

Når de brukes for seg kontrollerer valgknappene Automatisk lesing. Trykk begge **Valgknappene** samtidig for å slå Automatisk lesing av eller på. Trykk **Venstre Valg** knapp for å minske hastigheten på Automatisk lesing eller trykk **Høyre Valg** knapp for å øke hastigheten på Automatisk lesing

Når de trykkes funksjoner. For eksempel vil trykk på **Valg** knapp og topp eller bunn av Vippebrytere utføre side opp eller side ned. Du kan også trykke en **Valg** knapp og **Høyre** eller **Venstre** Panorering for å flytte til toppen eller bunnen av filen.

## Panorering vippebryter (Kun Focus 80)

De fire Panorering vippebrytere på Focus 80 fungerer som ekstra panorering knapper. De flytter i samme retning som Vippebryterne. Trykk opp på en av Panorering vippebryterne for å panorere til venstre og trykk ned for å panorere til høyre.

## Skift Knapper

Skift knapper brukes sammen med MELLROM, punkt taster, og andre taster for å angi kommandoer. For eksempel når du bruker JAWS, vil trykk på Venstre Skift + Punkt 4 eller Punkt 1 velge neste eller forrige linje i et dokument

## Markørhenter Knapper

Det er markørhenter over hver enkelt punktcelle. Trykk en **markørhenter** for å flytte markøren til dette stedet eller for å velge en link på en webside eller e-post melding. I linjemodus, trykk en **markørhenter** for å åpne en meny eller velge menykommandoer.

Trykk og hold **Venstre** eller **Høyre panorering** mens du samtidig trykker en **Markørhenter knapp** for å simulere et høyre museklikk på den posisjonen.

Du kan også bruke Markørhenter for å merke tekst i dokumenter. For å merke med markørhenterne trykk og hold nede **Venstre Skift**, og trykk så markørhenteren over teksten hvor du vil begynne merkingen. Slipp begge tastene. Flytt dit du vil avslutte merkingen og trykk **Venstre Skift** pluss **Markørhenteren** på denne plasseringen. Bruk en navigasjons kommando for å flytte fra startpunktet til sluttpunktet i teksten du velger.

## Av/På knapp

Av/På knappen slår Focus av eller på når den ikke er tilkoblet USB. Trykk og hold den inne i omtrent to sekunder for å slå leselisten på og hold den inne i omtrent tre og et halvt sekund for å slå den av

## Innstallere Focus Blue Leselist Driver

JAWS installerer filer automatisk som er nødvendig for å bruke Focus Blue under installasjonen av JAWS. Hvis du imidlertid bruker Focus leselisten med en annen skjermleser, må du installere drivere ved å gjøre følgende:

**Merknad:** Koble fra Focus leselisten fra datamaskinen når du utfører følgende: Hvis leselisten er tilkoblet under denne prosessen vil det bli feil med installasjonen og problem med at leselisten ikke fungerer som den skal.

1. Sett inn Focus Blue CD. Når Freedom Scientific Focus Oppsett dialogboksen åpner, velger du Installer Windows driver. Du får høre en rekke klikke-lyder mens driveren installeres.
2. Når installasjonen er ferdig, velg OK knappen for å restarte maskinen din.

## Konfigurere USB tilkobling

For å konfigurere Focus Blue leselisten for å kjøre JAWS med USB, gjør følgende:

**Merknad:** Hvis du bruker en tredjepart skjermleser, se dokumentasjonen som kom med den programvaren fordi prosedyren kan være forskjellig.

1. Etabler en forbindelse mellom Focus og din datamaskin med den medfølgende USB kablet.
2. Windows vil detektere leselisten og installere riktige drivere.
3. Når Windows har bekreftet at maskinvaren er riktig installert, kan du lukke og restarte JAWS. JAWS vil detektere og starte å bruke din Focus Blue leselist automatisk.

## Konfigurere Bluetooth tilkobling

For å bruke Focus Blue trådløst over Bluetooth, må du først konfigurere et Bluetooth kompaniskap mellom Focus og datamaskinen.

For å sette opp Bluetooth tilkobling mellom Focus leselisten og datamaskinen, gjør følgende:

1. Vær sikker på at Bluetooth er slått på i maskinen som kjører JAWS. Hvis du bruker et eksternt USB Bluetooth adapter, sett det inn og sjekk at det detekteres riktig.
2. Slå på Focus. Klokkeslett og batteristatus blir vist.
3. På datamaskinen, gå til Kontrollpanel og skriv "Bluetooth" i Søk redigeringsboksen.
4. Trykk **TAB** for å flytte til Legg til Bluetooth enhet og trykk **ENTER**. Datamaskinen vil begynne å søke etter Bluetooth enheter. Dette kan ta flere sekunder. Du blir plassert i en liste over enheter når søket er ferdig.
5. Bruk **PIL** taster for å velge din Focus leselist fra listen, for eksempel, Focus 14 BT, Focus 40 BT, eller Focus 80 BT, og trykk deretter **ENTER**. Hvis ikke Focus leselisten ble funnet, sjekk at den er slått på, og velg Søk igjen knappen.
6. Når du blir spurt om å angi en paringskode, skriv 0000 i redigeringsfeltet, og trykk deretter **ENTER** for å fullføre paringen av leselisten.

Du må nå konfigurere JAWS til å bruke Bluetooth tilkoblingen. Merk at ikke er nødvendig å først etablere en USB tilkobling før du bruker Bluetooth. Hvis du ikke har satt opp en USB tilkobling med Focus leselisten, gjør følgende:

**Merknad:** Hvis du bruker en tredjepart skjermleser, se dokumentasjonen som kom med den programvaren fordi prosedyren kan være forskjellig.

1. Trykk **INSERT+J** for å åpne JAWS-vinduet.
2. Trykk **ALT+I** for å åpne Innstillinger menyen og velge Leselist for å åpne Grunnleggende leselistinnstillinger dialog boksen.
3. Trykk **TAB** for å flytte til Legg til Leselist knappen og trykk **ENTER**.
4. I listen over Leselister, velg Focus og trykk **MELLOMROM** for å velge den, og deretter Neste.
5. I Velg ut port redigerings kombinasjonsboksen, velg Bluetooth.
6. Velg neste og vær sikker på at Focus er valgt som den primære leselisten.

7. Velg ferdig og du vil bli bedt om å restarte JAWS for å få disse innstillingene til å bli aktive. Velg OK for å lukke denne meldingen og en gang til for å lukke Grunnleggende leselistinnstillinger dialog boksen.
8. Avslutt og restart JAWS og din Focus Blue kommuniserer med JAWS over Bluetooth.

Hvis du bruker Focus leselisten over USB, og ønsker å bytte over til Bluetooth, gjør følgende:

1. Trykk **INSERT+J** for å åpne JAWS-vinduet.
2. Trykk **ALT+I** for å åpne Innstillinger menyen og velge Leselist for å åpne Grunnleggende leselistinnstillinger dialog boksen.
3. I Standard leselist kombinasjonsboksen, sjekk at Focus er valgt og velg deretter Endre innstillinger.
4. I Velg ut port redigerings kombinasjonsboksen, velg Bluetooth.
5. Velg OK og du vil bli bedt om å restarte JAWS for å få disse innstillingene til å bli aktive. Velg OK for å lukke denne meldingen og en gang til for å lukke Grunnleggende leselistinnstillinger dialog boksen.
6. Avslutt og restart JAWS og din Focus Blue kommuniserer med JAWS over Bluetooth.

## Paring med en mobil enhet

Du kan bruke Focus Blue som en Bluetooth leselist med mobile enheter som kjører Apple's iOS og Google's Android operativsystemer. Instruksjoner for paring av Focus med iOS eller Android enheter så vel som noen nyttige kommandoer til tilgjengelig på Focus CD eller på Freedom Scientific webside.

**Merknad:** Apple enheter må kjøre iOS 11 eller nyere for å pare med Focus leselisten.

Når du skal pare Focus Blue med en annen Bluetooth enhet, må du sørge for at leselisten er slått på og ikke koblet til USB. Når den er paret, kan du koble til USB kabel og deretter bruke leselistens tilkoblingsmeny, beskrevet i Fokus brukermanual for å bytte mellom aktive tilkoblinger.

## Notisblokk

Med notisblokk kan du ta notater så vel som å lese punktformaterte BRF bøker. For å starte Notisblokka, trykk **Meny** knappen og bokstaven **N (PUNKT 1-3-4-5)** samtidig. Du plasseres i en ny fil hvor du kan begynne å skrive inn tekst. For å lagre filen til det inkluderte Micro SD kortet, trykk **Høyre Skift** og bokstaven **S (PUNKT 2-3-4)** samtidig.

For å overføre BRF bøker for å lese i Notisblokk:

1. Trykk og hold Venstre Panorering knapp mens du samtidig slår på leselisten. Koble Focus til din datamaskin med den tilhørende USB kableen, og datamaskinen vil gjenkjenne Focus som en USB disk.

**Merknad:** Dersom du bruker en skjermleser slik som JAWS via USB, anbefales det at en slår på den syntetiske talen eller bruker en bluetooth tilkobling. Dette fordi USB ikke virker når Focus brukes som en lagringsenhet. Du kan heller ikke bruke Focus sin Notisblokk under denne operasjonen.

2. På PC-en, åpne mappen som inneholder dine BRF-filer, velg ønsket fil og trykk **CTRL+C**.
3. Naviger til og åpne USB-driveren for å vise innholdet i Micro Sd-kortet.
4. Åpne FSI, Focus5, Notisblokk, Bøker, og trykk deretter **CTRL+V** for å plassere BRF filer inn i denne mappen.
5. Når du er ferdig med å overføre BRF bøkene, trykk på program tasten på PC-en, velg USB-enheten og trykk **LØS UT**.
6. Slå Focus av og på igjen for å fortsette å bruke Notisblokken og motta punkt fra skjermleseren over USB.

For å åpne en fil, trykk **Høyre Skift** og bokstaven **O (PUNKT 1-3-5)** samtidig. Velg Notater mappen for å åpne filer som du har opprettet i Notisblokk eller velg Bøker mappen for å åpne BRF bøker som er overført fra datamaskinen din.

For mer informasjon om bruk av Notisblokk, trykk **Høyre Skift** og bokstaven **H (PUNKT 1-2-5)** samtidig for å åpne hjelp.