


Kom i gang – veiledning

# TD I-110




## Hva er i esken?

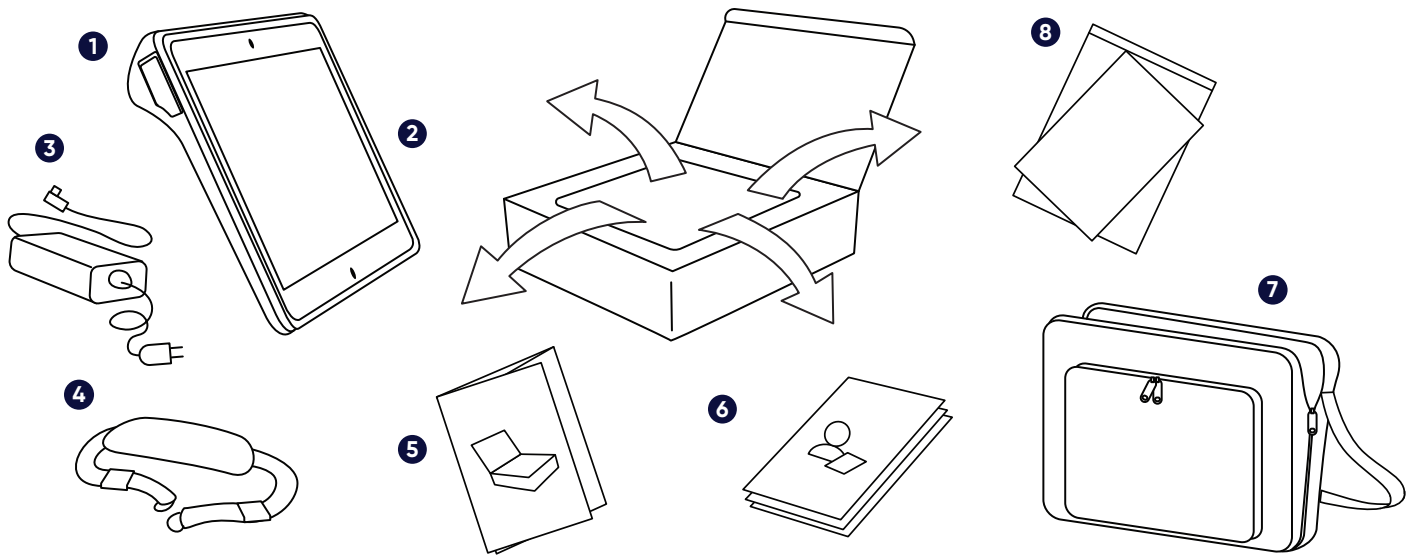

- 1 Enhet
- 2 Slitesterkt deksel
- 3 Strømforsyning
- 4 Skulderstropp
- 5 Kom i gang-veiledning
- 6 TD Snap-opplæringskort
- 7 Bæreveske
- 8 Dokumenter om lisens, konfigurering og sikkerhet og samsvar

## Bli kjent med enheten din

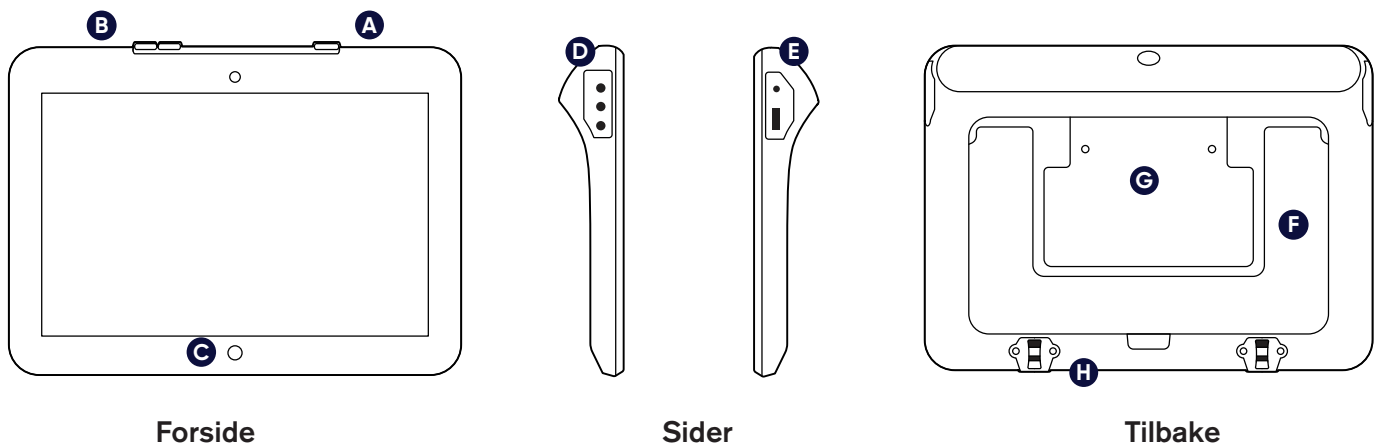



- A Av-/på-knapp
- B Volumknapper
- C Hjem-knapp
- D Lyd- og bryterporter
- E Strømtilkobling og USB-porter
- F Integreert bordstøtte
- G Monteringssteder
- H Tilkoblinger for bærestropp

Følg trinnene i denne veiledningen for å konfigurere og begynne å bruke enheten.

## Trinn 1: Første oppsett

### Start enheten


- 1 Koble strømforsyningen til enheten og koble til en stikkontakt
- 2 Trykk på Av-/på-knappen

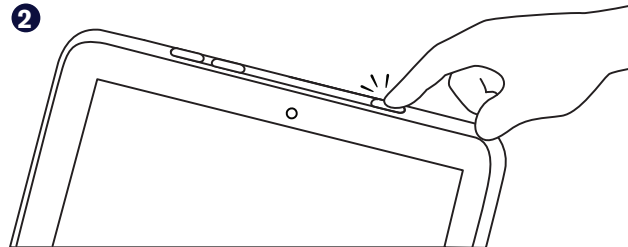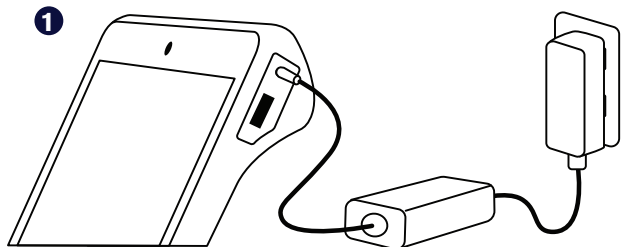

### Oppsett av Windows

Hvis enheten din ikke har blitt forhåndskonfigurert, vil du bli bedt om å fullføre prosessen med Windows-oppsett først.

Selv om denne prosessen ikke krever en Microsoft-konto, så anbefaler vi at du kobler til eller oppretter kontoen for brukeren, og ikke for hjelperen.

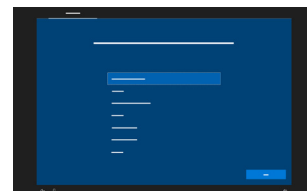

## Trinn 2: Oppsett av TD Snap



Dobbeltrykk på ikonet for å starte TD Snap-appen. Følg instruksjonene for å opprette en ny bruker eller gjenopprette en lagret brukerfil.

## Trinn 3: Stativ og posisjonering

Enheden kan posisjoneres ved hjelp av et monteringsystem, ved å legge den flatt på en overflate, eller ved å bruke den integrerte støtten. Begynn med å sørge for at brukeren er komfortabelt plassert, og finn deretter enhetsposisjonen som gir deg god sikt til skjermen og enkel tilgang til ønsket tilgangsmåte. Plasser alltid enheten for å passe til brukeren, ikke motsatt. Det er forventet at enheten kanskje må posisjoneres på nytt i løpet av dagen. Koble til skulderstroppen for sikker transportering.

## Trinn 4: TD Snap-opplæringskort

Fortsett konfigureringen med opplæringskortene for TD Snap som kom i esken sammen med enheten. Opplæringskortene guider deg gjennom funksjonene i TD Snap, grunnleggende redigering, sikkerhetskopiering av data og noen aktiviteter som hjelper deg med å integrere TD Snap i hverdagen din.

# Flere ressurser

Skann QR-kodene med telefonen, eller bruk lenkene.



Tobii Dynavox  
[no.tobiidynavox.com](https://no.tobiidynavox.com)



myTobiiDynavox  
[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



TD-felleskap på  
Facebook  
[qrco.de/fbnbno](https://qrco.de/fbnbno)



Tobii Dynavox-  
opplæringsvideoer  
(kun på engelsk)  
[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



TD I -110  
Enhetsdokumentasjon  
[qrco.de/I-110manual](https://qrco.de/I-110manual)



TD  
Snap-dokumentasjon  
[qrco.de/bcgYPO](https://qrco.de/bcgYPO)



Lær om tilgangsmåter  
[qrco.de/bbA7US](https://qrco.de/bbA7US)



Teknisk støtte for Norge  
55 55 10 60