

MONTERINGSANVISNING & HURTIGGUIDE

ACTIVE EASYRISER STANDARD OG

ACTIVE EASYRISER SMALL



Active Easyriser Standard

for personer med højde over ca 160 cm

Active Easyriser standard 45 - 60 kg

Active Easyriser standard 60 - 80 kg

Active Easyriser standard 80 - 110 kg

**Active Easyriser er testet og godkendt
i henhold til krav og standarder:**

NS-EN 16139:2013

NS-EN 1021-1:2014

NS-EN 1021-2:2014



Active Easyriser Small

for personer med højde under ca 160 cm

Active Easyriser small 45 - 60 kg

Active Easyriser small 60 - 80 kg

Active Easyriser small 80 - 110 kg



HJELPEMIDDEL™
PARTNER


1. MONTERING

1.1 Montering av ben, velge løftestolens setehøyde


- Trekk opp glidelåsene på sidene av stolen.
- Legg stolen på siden.
- Før benet opp i sporet.
- Monter vingskruer med stoppskive i ønsket høyde.

Ønsker du å endre høyden på stolbena kan du åpne glidelåsen på siden av stolen (festet med borrelås), da får du tilgang til å justere løftestolens benhøyde.


Løsne skruene for så å flytte stolbena i ønsket posisjon.

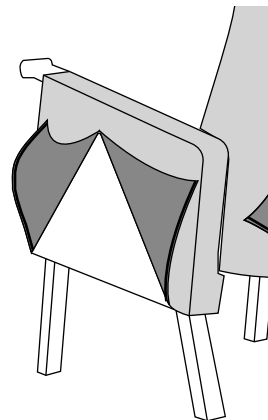

Du kan ha ulik høyde på bena foran og bak for å endre vinkelen på setet. Vi anbefaler at bakbena er montert ett eller to hull lavere enn forbena slik at du får en mer tilbakeleant sittestilling og økt komfort. For din sikkerhet, må bena parvis, foran og bak, ha lik høyde. Stolen kan reguleres fra en setehøyde på 37-53 cm.

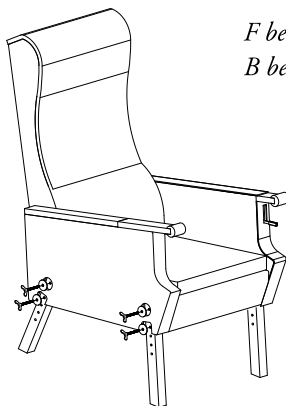

F ben foran
B ben bak

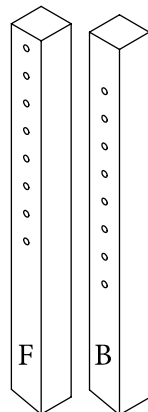

1.2 Finjustering av stolens løftekraft


På undersiden av stolen kan du finjustere stolens løftekraft. Stolen leveres med bolten plassert i midterste posisjon.

- Du trekker ut splinten (A)
- Fjerner låsebolt (B)


Flytter du låsebolten fremover vil du få mindre løftekraft. Flytter du låsebolten bakover vil du få mer løftekraft.

Sett på plass begge de sorte avstandsstykkene.

AVSLUTT ALLTID MED Å FESTE SPLINTEN.

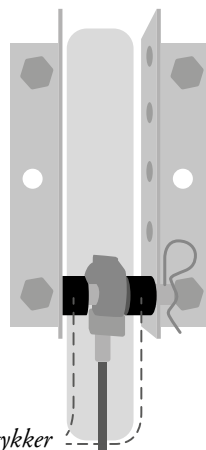

Avstandsstykker


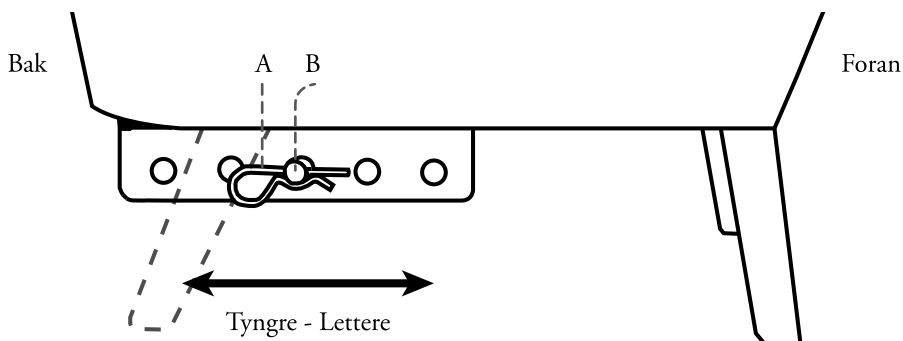


2. TA STOLEN I BRUK

2.1 Aktivering av stolens løftefunksjon

Betjeningsenhet er plassert på brukerens høyre side.

- A Løftefunksjonen er ikke aktivert.
Setet er låst i en posisjon.
- B Dra spaken opp og lett til venstre.
Løfestolen er aktivert.
Stolen er klar til å tas i bruk.

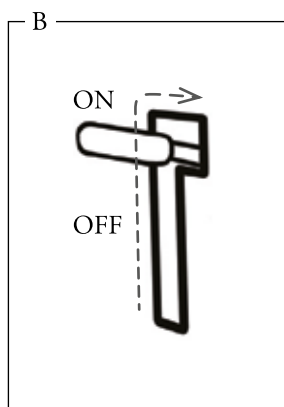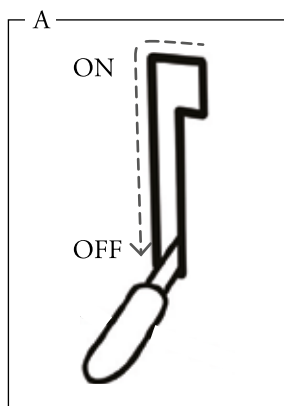


Stolen kan låses i alle posisjoner fra sittende til stående. Det betyr at du også kan bruke løftefunksjon til å endre sittestilling, samt få en mer aktiv sittestilling ved behov. Spaken låses i nedre posisjon når du har funnet ønsket sittestilling.

2.2 Oppreisingsfunksjon - bruke stolen


Fra stående til sittende posisjon:

Sett deg ned på setet med baken godt inntil stolens rygg. Stolen senker deg kontrollert ned til sittende posisjon.

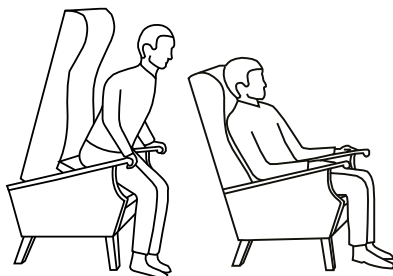

Fra sittende til stående posisjon:

Gjør det du alltid har gjort når du reiser deg. **Sett beina godt innunder deg, ta tak i armlenene og len overkroppen fremover.** Stolen vil nå hjelpe deg automatisk opp i stående.

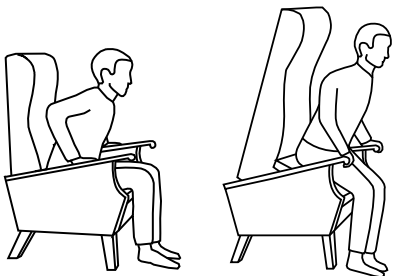

HMP.no

**VELFERDSTEKNOLOGI &
INNOVATIVE HJELPEMIDLER**

OM OSS

Hjelpemiddelpartner AS er en norsk leverandør av velferdsteknologi og innovative hjelpemidler. Hjelpemiddelpartner AS har hovedkontor på Sandane i Nordfjord og et kontor i Tønsberg. Vi har gjennom mange år skaffet oss bred erfaring i bransjen, og tilbyr nye og innovative løsninger til det norske helsemarkedet.

© 2021 Hjelpemiddelpartner AS
Alle rettigheter forbeholdt.

Informasjonen i denne manualen kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, det være seg elektronisk eller ved trykk, uten å på forhånd ha fått skriftlig tillatelse fra Hjelpemiddelpartner AS.

Hjelpemiddelpartner AS
Breimsvegen 2
6823 Sandane

Bruksanvisningen finner du også på
hmp.no/active-easyriser-nav/