


Oppreisingstol

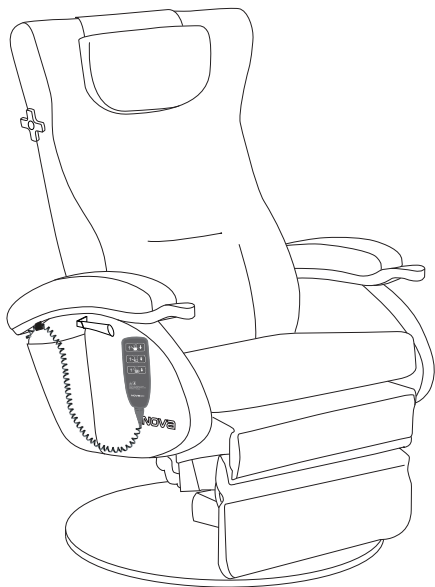


NOVA 30

HURTIGMANUAL

NO

Når du mottar oppreisingstolen

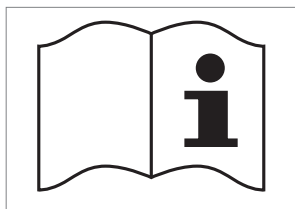


For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye oppreisingstol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk stolen.



Kontroller at oppreisingstolen du har mottatt har korrekte mål og tilbehør i henhold til din bestilling.

Stolen blir levert ferdig montert fra fabrikk. Det kan være nødvendig å stille inn stolen til brukeren og montere eventuelt tilbehør.

Innstillinger som er vist i denne hurtigmanualen kan utføres uten bruk av verktøy og av brukeren selv eller ledsager. Andre innstillinger utføres av kvalifisert personale.

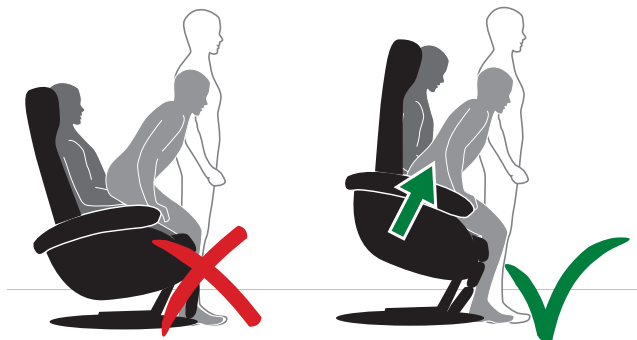

Forflytning inn- og ut av stolen

Gjennom løtefunksjonen gir oppreisningsstolen god og stabil støtte ved forflytning.

Reise seg:

- Kjør stolen til oppreist posisjon.
- Plasser føttene innunder deg.
- Ta tak i armlenene og stå opp.



Sette seg:

- Påse at stolen står i oppreist posisjon.
- Still deg helt inntil fotbrettet.
- Ta tak i armlenene og senk deg ned i stolen.
- Kjør stolen ned til sitteposisjon.

⚠ Advarsel!

Kjør alltid stolen opp i oppreist posisjon ved forflytning ned i- eller ut av stolen.

Unngå forflytning ned i- eller ut av stolen når stolen ikke står i oppreist posisjon.

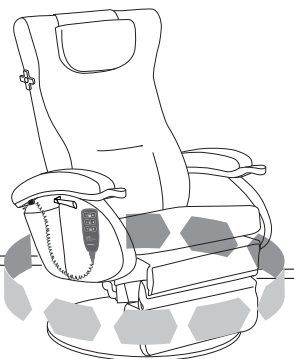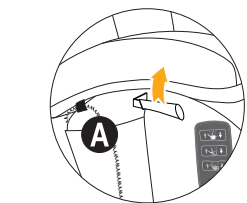

Svingutløser



Svingutløser er plassert på både høyre og venstre side. Benytt den utløserhendelen som fungerer best for deg.

- Dra utløserhendelen **A** opp.
- Drei stolen til ønsket posisjon.
- Slipp utløserhendelen. Stolen stopper automatisk rotasjonen når du slipper utløserhendelen og låser i den valgte posisjonen.
- Stolen har en svingradius på 270°, med automatisk endestopp.

⚠ Advarsel!

Påse at oppreisningsstolen er plassert slik at stolens bevegelsesmønster ikke kan forårsake situasjoner som kan føre til skade på stolen, bygningsdeler, andre personer eller deg selv.


Fotbrettet og ryggen må ha fri bane. Sikkerhetszone rundt stolen er 110 cm fra senter av understellet.

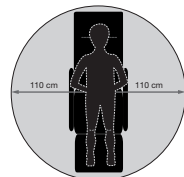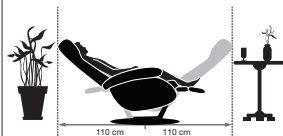

Vinkling av nakkestøtten

For å gi en bedre tilpasset vinkel til nakken, for eksempel når man leser, eller ser på TV, kan øvre del av ryggen vinkles.

- Vri på rattet til du finner den ønskede posisjonen på nakkestøtten. Trykk eventuelt lett på øvre del av ryggen for å hjelpe til.

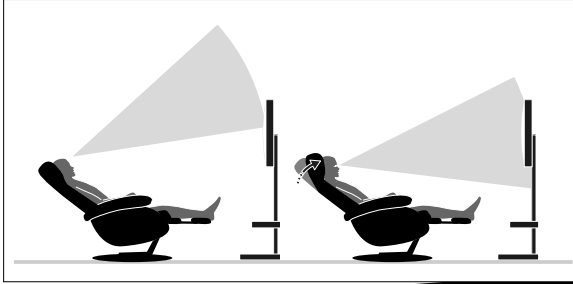


Justering av armlenehøyde

Armlenehøyden justeres ved å heve eller senke sidevengene. Innstillingen er trinnløs og sikrer god støtte for armene.

- Trekk ned glidelåsen på utsiden av armlenet.
- Løsne rattet **A** inne i armlenet.
- Skyv sidevengen opp eller ned. Skru til rattet når du har oppnådd ønsket høyde.
- Dra opp glidelåsen igjen.
- Gjør den samme justeringen på den andre siden og påse at du har lik høyde på begge armlener. Se måleskala.
- Standard høyde er merket med oransje.
- Armlenet i nederste posisjon muliggjør sideveis forflytning.

⚠ Advarsel!

Klemfare! Unngå å få fingrene i mekanikken på innsiden av armlenet ved justering.

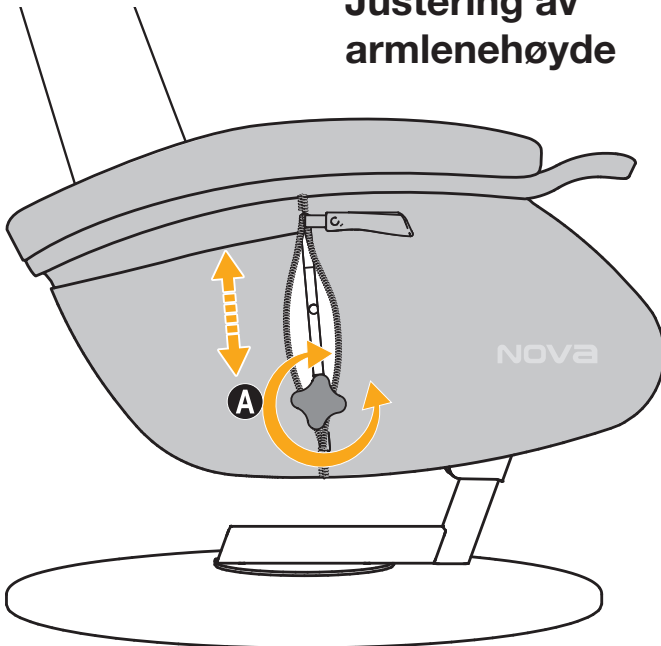

Håndkontrollen

Den oversiktlige og lettfattelige håndkontrollen gir deg mulighet til å betjene stolen i henhold til egne ønsker og behov.

Løft:



Oppreist stilling vist på stol med rettløft.

Fra en sittende stilling går fotbrettet ned og sitteenheten løftes.



Oppreist stilling vist på stol med skråløft

Fra en sittende stilling går fotbrettet ned og sitteenheten løftes og vinkles forover.

Hvile:



Sitteenheten senkes og tiltes bakover. Fotbrettet går opp.

Rygg:



Ryggen vinkles forover uavhengig av andre funksjoner.

Rygg:



Ryggen vinkles bakover uavhengig av andre funksjoner.

Tilt:



Sitteenheten tiltes forover uavhengig av andre funksjoner.

Tilt:



Sitteenheten tiltes bakover uavhengig av andre funksjoner.



Klemfare når stolen er i bruk.
Stolen er alltid på i stand-by når kontakten er tilkoblet.

NOVA 30

Håndkontrollen er merket i henhold til kravene til elektromedisinske produkter med permanent strømtilkobling benyttet i hjemmet uten tilsyn.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 Vestby

T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no