


Sikkerhetsanvisninger


- Les brukermanualen nøye. (www.lopital.com).
- Maksimal brukervekt 227 kg / 500 lbs.
- Forsikre deg om at Marina basic / Marina deluxe brems er aktivert ved forflytning av bruker inn og ut av dusjvognen.




Elektrisk betjening

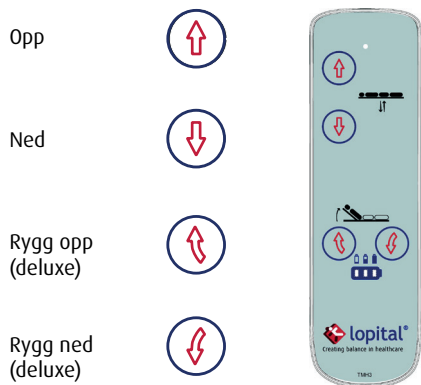


Hydraulisk betjening

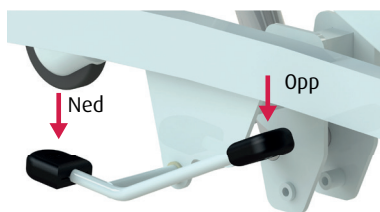


Ryggregulering (Deluxe)

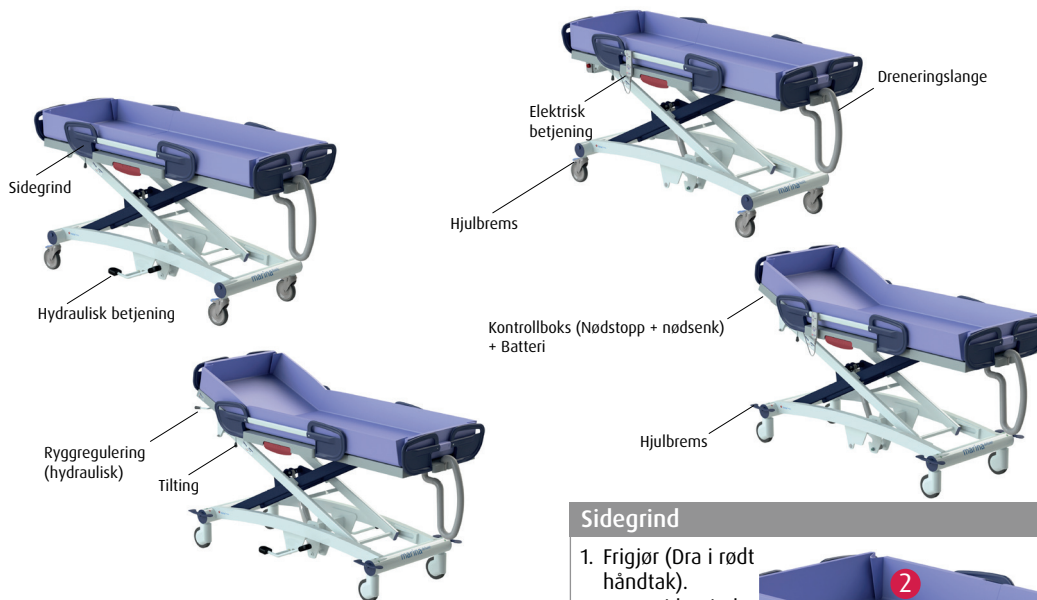

Tilting (Anti-Trendelenburg)

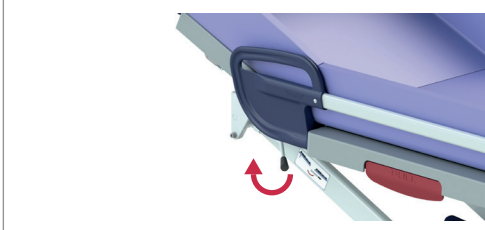

Hjulbrems Marina basic (61002000/2050)

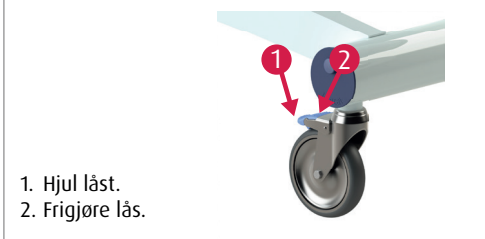

1. Hjul låst.
2. Frigjøre lås.


Hjulbrems Marina deluxe (61002010/2060)

1. Hjul låst (innside ned).
 2. Hjul frigjort (Fotende) (utside ned).
- Horisontal bevegelse : Hjul frigjort.



Sidegrind

1. Frigjør (Dra i rødt håndtak).
2. Roter sidegrind til riktig posisjon.

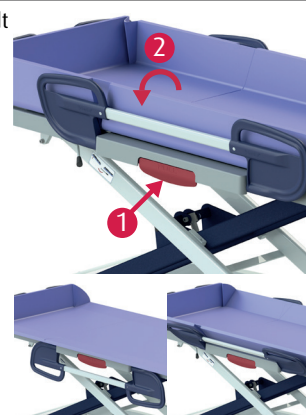

Drenering

Vannet dreneres ut av Marina basic / Marina deluxe via en dreneringslange. Dette gjøres ved å ta slangen ut av holderen (1) og putt den ned i et egnet avløp. Påse at slangen alltid er festet i holderen ved transport.




Lade batteriet (elektrisk)

Lade batteriet før det er helt tomt for å forlenge levetiden.




Batteri indikator på hånd kontroll.

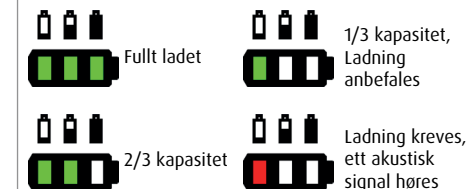

Nødstopp & nødsenk (elektrisk)

1. Trykk inn nødstopp i et nødstilfelle, hvis kjøring opp eller ned må stoppes umiddelbart.
2. Ved å holde inne Nødsenk i et nødstilfelle, vil dusjvognen senkes til laveste posisjon.

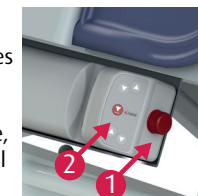

Rengjøring og vedlikehold

Marina basic / Marina deluxe må rengjøres etter hver bruk, med vann og et ordinært husholdningsmiddel. Ikke bruk skuremiddel eller andre aggressive produkter for rengjøring. Hvis nødvendig kan madrassen desinfiseres med 70% ethanol eller propanol. Komplette rengjøring og vedlikeholdsanvisning finnes i brukermanualen. (www.lopital.com)

I henhold til det Medisinske regulativet (MDR), skal produktet vedlikeholdes i henhold til produsentens anvisninger. Disse anvisninger finnes i brukermanualen, se også websiden til Lopital (www.lopital.com).

Hvis produktet bryter sammen, kontakt din Lopital forhandler.

Brukermanual
For komplett brukermanual gå til www.lopital.com



Viktig!

Denne Quick guiden er ikke en erstatning for brukermanualen.