


# Quick Guide

CareBidets - JH4000+

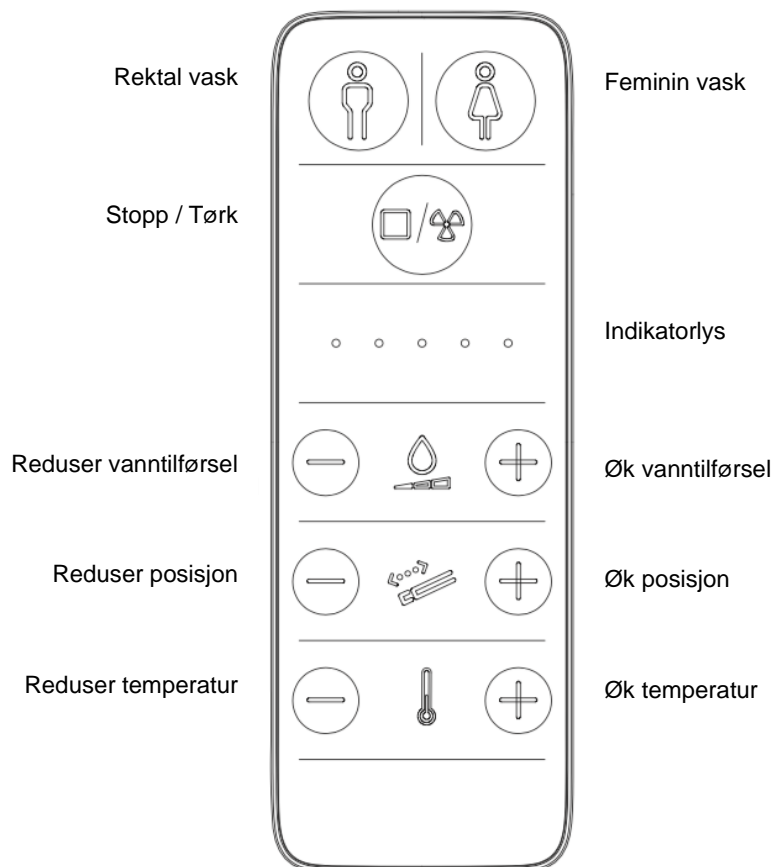

## Tips & gode råd

### Hvordan skal jeg sitte på toalettet?

Len overkroppen fremover, slik at rumpeballene spres. På den måte kan vannstrålen rengjøre mest effektivt. Innstill derefter dysearmens posisjon etter behov.

**Typiske feil:** Du lener overkroppen tilbake og glir frem på setet. R rumpeballene lukker sammen og vannstrålen kan ikke gjøre ordentlig rent.

### Merk

Hvis toalettet ikke har vært i bruk de siste 72 timer, vil den neste gang produktet aktiveres gjennomføre et 3 minutters selvrensningsprogram. Vaskefunksjonen kan ikke aktiveres i de 3 min. programmet kjører.



medemagruppen

# Quick Guide

OneTouch Standard (CB4000-03)

1. Trykk én gang på bryteren og ditt personlige vaske-tørkeprogram aktiveres.
2. Vent til produktet har gjennomført hele programmet. Først starter den med å:
  - I. Vaske rektalt
  - II. Vaske feminint – Hvis innstilt til kvinnelig bruker.
  - III. Tørking
3. Har du behov for at avbryte programmet underveis, trykk på bryteren igjen.
4. Du kan innstille dit automatiske vaske- og tørkeprogram etter dine personlige preferanser. Les mere i brukermanualen til produktet.



## Tips & gode råd

### Hvordan skal jeg sitte på toalettet?

Len overkroppen fremover, slik at rumpeballene spres. På den måte kan vannstrålen rengjøre mest effektivt. Innstill derefter dysearmens posisjon etter behov.

**Typiske feil:** Du lener overkroppen tilbake og glir frem på setet. R rumpeballene lukker sammen og vannstrålen kan ikke gjøre ordentlig rent.

### Merk

Hvis toalettet ikke har vært i bruk de siste 72 timer, vil den neste gang produktet aktiveres gjennomføre et 3 minutters selvrensningsprogram. Vaskefunksjonen kan ikke aktiveres i de 3 min. programmet kjører.