

Hovedfunksjoner

Funksjoner i beboermodus

Tastene blinker grønt når låsemodus aktiveres

Når du trykker på en bestemt piltast, lyser den valgte knappen

Funksjoner i pleiemodus

Forblir låst inntil pleiemodus er aktivert



Instruksjonsvideoer på diverse språk
(Instructional videos in different languages)

Ikke tilgjengelig for Movita- og LE-modeller



Ryggstøtte

Regulerer hjertebrettet

Sittestilling

Synkron regulering av rygg- og bendel

Høyderegulering

Høyderegulering av hele sengen

Opp

Bevegelse oppover av den valgte funksjonen

Ned

Bevegelse nedover av den valgte funksjonen





Automatisk komfortstolstilling

Pleiesengen regulerer seg til den forhåndsinnstilte sittestillingen

Automatisk forebyggingstilling

Avlaster ved vaskulære sykdommer og forebygger samtidig trykksår (semi Fowler-stilling på 30°)

Beskrivelse av lysdiode

-  Systemet er klart for drift, eller er i låsemodus.
-  Trykket på funksjonstast.
-  Når du har trykket på en funksjonstast og deretter holder inne en piltast.
-  Reguleringen er utført.

Hvordan aktivere pleiemodus



min. 3 sek.

(deaktiveres etter 2 min. inaktivitet)

Hvordan aktivere/deaktivere låsefunksjonen



min. 5 sek.


LED




2 sek.



Lys under sengen *

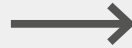


min. 3 sek.

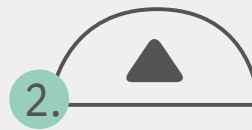

Hvordan regulere kun lårdel



Sengelampe*

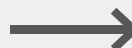

Hvordan «resette» håndkontrollen **

min. 10 sek.



Hvordan «resette» pleiesengen **



Etter ca. 10 sek. vil sengen bevege seg til nederste nivå og avgi et lydssignal når den er ferdig.

* Tilbehørsprodukt.

** Gjelder Sentida 6 og Sentida SC (se egen hurtigguide for mer info).