


Hurtigguide til Allora 3

Hva er i boksen:

- Lader
- Bæreveske
- Bærestopper
- Fingerguide (1) og clips (2)

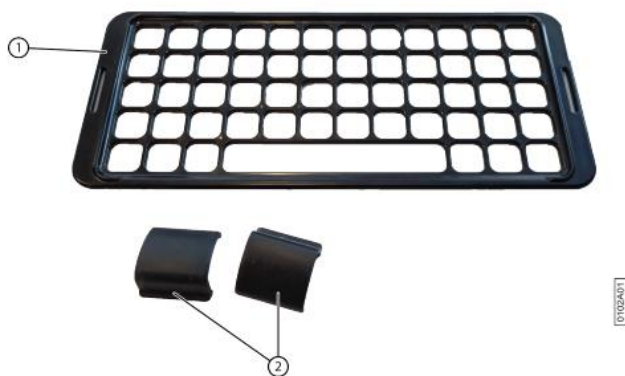

Første bruk:


Ladestatus på mellom 40% og 90 % er best for å bevare batteriets funksjon.

Fingerguide skal passe på at man ikke trykker på mer enn en bryter om gangen. Fingerguiden har to ulike høyder, ut fra hvilken vei du legger den. Bare ta av clipsene på siden og snu.




- Legg fingerguiden på tastaturet med ønsket høyde.
- Sett på clips (1)(3) for å feste fingerguiden til tastaturet.





Slå på maskinen ved å trykke på  tasten til av/på indikatoren lyser opp.

Normalt vil man bruke dvalemodus, da trykker du bare lett på .

Om man skal **slå av** maskinen trykker du på  deretter velger du  generelt →  slå av.

Skriv inn tekst og les det høyt


Skriv det du ønsker å si med bruk av tastatur, ord- og setningsprediksjon trykk på  for å lese teksten høyt.

Tastaturnarveier	Funksjon
FN + 	Gå til meldingshistorikk
FN + 	Lagre tekst som notat
FN + 	Lagre tekst som hurtigmelding
FN + 	Legg inn spesialbokstaver
FN + 	Juster volum
FN + 	Juster lysstyrke
FN + A↑	Juster tekststørrelse
FN + 	Gjem/vis tekst på partnerskjerm
FN + 	Slå av/på lyd
FN + T	Les hva klokka er
FN + D	Les hvilken dato det er
FN + ←	Gå til start av tekst
FN + →	Gå til slutten av tekst
🏠 + ←	Gå til forrige setning
🏠 + →	Gå til neste setning
🏠 + 	Gå til neste linje
🏠 + 	Lagre tekst som ord- eller setningsprediksjon
FN + 🏠 + 	Gå til oversettingsmodus. Teksten blir oversatt til språket du velger.
FN + 🏠 + 0-9	Slett ord eller setningsprediksjon som er koblet opp mot valgt tall.



Ord- og setningsprediksjon

Når du begynner å skrive vil det automatisk komme opp valgt prediksjon i bunnen av skjermen. Du kan velge prediksjon med bruk av berøringsskjerm eller tall på tastatur.

Bruke hurtigsetninger

Trykk på , trykk på setning, velg nummer eller bruk piltastene til å velge hurtigsetning.


Spille av lyd

Trykk to ganger på , velg  og trykk på lyden, velg nummer eller bruk piltastene.

Hva finner du i maskinen?



nr	Identifikasjon	Forklaring
1	Lyssensor	Lyssensor som lyser opp tastatur om nødvendig.
2	USB-C	Laderinngang
3	Batteriindikator	Lyser opp når maskinen er tilkoblet lader. Lyser oransje når den lader, lyser grønt når maskinen er fulladet.
4	Jack for hodetelefoner	Tilkobling for hodetelefoner. Høytalere blir automatisk frakoblet ved bruk.
5	Mikrofon åpning	Mikrofon som tar opp lyd under lydopptak.
6	Av/på indikatorer	Lyser når maskinen er på. Grønn- mer en 50% ladet. Oransj - mindre en 50% ladet Rød - Trenger lading.
7	Infrarød mottaker	IR-mottaker, brukes til å lære opp IR-koder.
8	Tastatur	Tastatur med baklys. Styres av lyssensor.
9	Berøringsskjerm	Berøringsskjerm

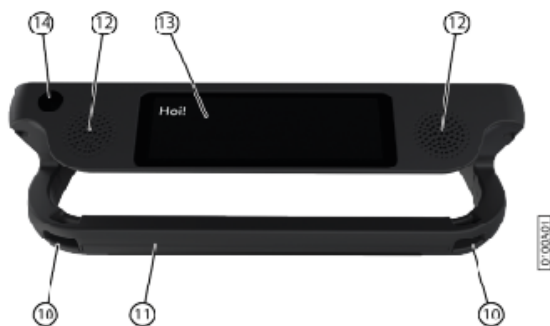

nr	Identifikasjon	Forklaring
10	Feste til bærestropp	Feste til bærestropp
11	Håndtak/bordstativ	Håndtak til å bære maskinen. Bordstativet er laget for ergonomisk vinkling av tastatur.
12	Høytalere	Lyd ut
13	Partnerskjerm	Kan vise tekst til kommunikasjonspartner.
14	Infrarød sender	Sender IR-signaler til andre enheter.

Behov for støtte?

Om du lurer på noe mer, sjekk vedlagt brukermanual eller ta kontakt med oss.

Lykke til!



Sunniva Stokke

Ergoterapeut
Kommunikasjonshjelpemidler

Telefon: 90066970

sunniva@picomed.no