



# Oppstarts veiledning

Gratulerer med din

Go-box



*Dette er en veiledning så du enkelt kan sette opp og komme i gang med din Go-box.*

*Koble opp Go-box steg for steg og du er du raskt i gang med å få opplept eller forstørret underteksten på din TV.*

*Vi håper du får en god opplevelse med din Go-box.*

1. Ta Go-box ut av esken og plasser den i nærhete av din TV-boks.  
En TV-boks kan være en TV motaker som eksempelvis en boks fra Telenor T-We, Get, Altibox, RiksTV, en Apple TV, en Chromecast, eller tilsvarende Tuner eller annen boks som sender digitalt signal ut via HDMI.
2. Koble HDMI kabel fra din TV-boks til porten DECODER / HDMI IN, i din nye Go-box.
3. Koble deretter HDMI kabel fra porten TV / HDMI OUT i din Go-box til HDMI IN på din TV. Noen TV-er har flere HDMI innganger.
4. Slå på din TV tuner/boks/Apple TV etc. og din TV og velg et program eller en serie du ønsker å se på.

5. Din Go-box starter automatisk opp og leser underteksten høyt, når et program eller en serie starter.

6. Du kan justere talehastigheten ved at trykke på PLUS og MINUS ved ikonet av en løpende person. Knappene er plassert nest øverst på venstre side av fjernkontrollen.



7. Du kan også koble talen over til medfølgende hodetelefon ved å trykke på taleboble ikonet. Da får du vanlig tale på TV og opplest undertekster i hodetelefonen. Knappen er plassert øverst på venstre side av fjernkontrollen.



# Bilde av oppsett/oppkobling



## Gode råd

- Sørg for at din TV-boks har en output på 1080i eller 1080p (Full HD).
- Har du et trådløst nettverk (Wi-Fi) bør du koble din Go-box til dette for å få oppdateringer. Se hoved manual for tilkobling til Wi-Fi.

Er det noe du lurer på?

Kontakt Logisense AS

Sørg for å ha serienummer på enhet klar.



Logisense AS  
Sagbrukskata 4  
2150 Årnes

Tlf: 22 12 00 86

E-Post: [post@logisense.no](mailto:post@logisense.no)

[www.logisense.no](http://www.logisense.no)