



VELA Sango

VARIANT: FORHJ.-/BAKHJ.-/SENERDRIFT - ENKEL

Manual. nr. 105750



VIKTIG! Den elektriske rullestolen må lade i 12 timer før den kan brukes.

NÅR DU TAR RULLESTOLEN I BRUK

- :: Slå på rullestolen med I/O – knappen.
- :: Sett deg i rullestolen og reguler funksjonene, slik at du får en optimal sitte- og kjørekomfort.

FØR DU KJØRER RULLESTOLEN

- :: Setetilt/vinkelen må stå i vannrett stilling (nøytral posisjon).
- :: Hastigheten reduseres automatisk ved heving/tilt av setet (Gul hastighetsindikatorer blinker på joysticken).

INN- OG UTSTIGNING

- :: Slå alltid av rullestolen før inn- og utstigning.

SIKKER KJØRING

- :: Rullestolen må ikke kjøres skrått på et hellende underlag, da helling til siden øker risikoen for farlige situasjoner.

KJØRING VIA JOYSTICK

- :: Slå rullestolen på ved å trykke på I/O knappen.
- :: Reguler tilt til vannrett stilling (nøytral posisjon).
- :: Reguler hastigheten med opp/ned knappen. Hastighetsindikatoren lyser gult (1-5 punkter, avhengig av hastighet).
- :: Styr rullestolen med joystick i den retningen du ønsker å kjøre.

Stort utslag= kraftig akselerasjon og høy fart.

Lite utslag = svak akselerasjon og lav fart.

Armlene, høyde- og dybderegulerbare, oppfellbare

Nakkestøtte, innstillbar

Setetilt, elektrisk

Fotplate, oppfellbare, vinkelinnstillbare / sidehengte fotstøtter, lengdeinnstillbare

Frikobling (på begge sider, enten foran eller bak drivhjulene)

Nødsignal*
Horn
I/O - På og av
Lys, På / Av *
Mode: Kjør/setetilt
Blink, Høyre/venstre*
Joystick

* Bare aktiv om du velger kjørellys

SIKRING AV ELEKTRISK RULLESTOL MED BIL, BUSS OG TOG

- :: Se at frikobling er i driftposisjon slik at stolen ikke kan bevege seg under transport. Slå av stolen.
- :: Forsikre deg om at den elektriske rullestolen er forsvarlig festet med godkjent utstyr under transport med bil, buss og tog.
- :: VELA Sango er krasjetestet og kan derfor brukes som passasjer-sete under transport med riktig tilbehør.

LADING AV RULLESTOLEN

- :: Batteriindikatoren er innebygd i joystick. Ved fullt ladet batteri lyser de fargede lysdiødene: grønn, gul og rød.

SLIK LADER DU STOLEN (STANDARD OPLADER)

- :: Batteri bør lades hver natt.
 - :: Laderen er helautomatisk, og regulerer ladestrøm etter behov.
1. Stolen parkeres og slås av (I/O knappen)
 2. Ladestøpselet settes i kontakten foran på styreboksens underside.
Merknad! Rullestolen kan ikke slås på under lading.
 3. Bjælken i det lille display på toppen av laderen viser, at ladning er i gang.
 4. Batteriet er fulladet, når lampen på laderen lyser grønt.

Advarsel! Dekk ALDRI laderen når den er koblet til strøm.

Mere informasjon om bruk av stolen, feilsøking og vedlikehold finnes i Bruksanvisningen og på www.vermundlarsen.no.
Informasjon om tilbehør: Kontakt VELA.