


HÅNDKONTROLL T4

Lysdioder for hastighet.

Lysdioden «ON» lyser gult når systemet er aktivt. Hvis systemet ikke er aktivt, slår LED-lyset seg av. Når LED-lyset er på, kan TurnAid-systemet tas i bruk umiddelbart.

Hastighetskontroll:
Skifter mellom 100 – 75 – 50 % i hastighet

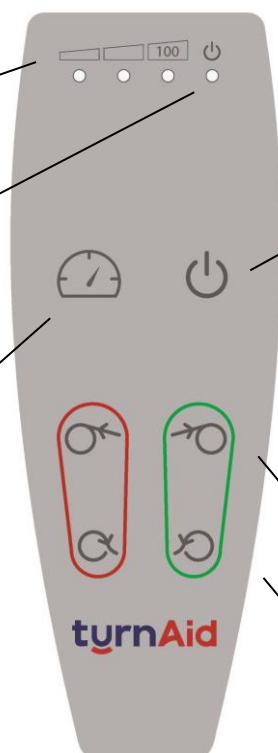


«ON»-knappen: aktiver vendesystemet ved å trykke på knappen 2 ganger etter hverandre. «ON»-knappen kan også brukes som en stoppknapp når den holdes nede i mer enn 2 sekunder..

Betjeningsstaster til henholdsvis **rød** og **grønn** motorrull – strammer vendelaken.
Betjeningsstaster til henholdsvis **rød** og **grønn** motorrulle – slakker vendelaken.

FOTBRYTER T4

Betjeningsstaster for **rød** hhv. **grønn** motorrull -> slakker av vendelaken = indre venstre og indre høyre taster



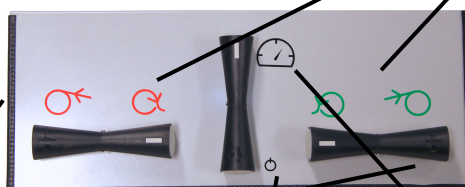

Betjeningsstaster for **rød** hhv. **grønn** motorrull -> strammer vendelaken = ytre venstre og ytre høyre taster.



«ON»-knappen = midterste tast.


Hastighetskontroll

FORKLARING TIL ØVRIGE PIKTOGRAMMER

Piktogram	Benevnelse	Forklaring
	Advarsel	Varseltrekanten signaliserer at særlig forsiktighet er nødvendig.
	CE-symbol	Merket indikerer at det er utarbeidet CE-merking for systemet.
	VIKTIG	Bemerk spesielt.
	Elektronisk avfall	Symbolet indikerer at systemet etter bruk skal returneres til nærmeste gjenvinningsstasjon for gjenbruk og deponering iht. gjeldende lovverk.
	Tetthetsgrad	Tetthetsgrad IPX0 => Ikke vaskbar, kun for innendørsbruk

TURNAID T4 HAR TRE FUNKSJONSINNSTILLINGER: for trinnvise instruksjoner – se kapittel 5 i brukerveiledningen

1: Arbeidsposisjon (under vending)

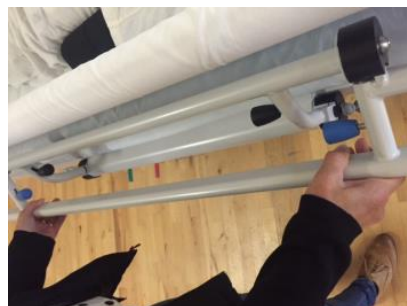

2: Nedfeldt posisjon



(ut av sengen-posisjon eller fra side til side, for å redusere avstand til bruker

3: Sengegrindposisjon



(under vending)