



Importør

Schuchmann AS
Gråterudveien 16A
3036 Drammen
Phone: +47 32 88 48 00
www.schuchmann.no

Produsent

KayserBetten GmbH & Co. KG
Rieper Straße 12
D- 29683 Bad Fallingbostal GERMANY
Phone: +49 5163-6595
info@kayserbetten.de • www.kayserbetten.de


Kort instruksjon HANNAH 135 størrelse 1 og størrelse 2

Sikkerhetsinstruksjoner

- Vedlikehold/ sikkerhetskontroll en gang i året
- Pleieseng for hjemmebruk og klinisk bruk med tørr innside.
- Dørene må være lukket når barn er uten tilsyn.
- Maksimal pasientvekt er 150 kg.
- Hvis sengen er utstyrt med hjul, må sengen sikres mot bevegelse ved å låse hjulene.
- Alle husholdningsrengjøringsmidler uten ammoniakk og skuremidler er tillatt for rengjøring av sengen.
- OBS! Tørk av sengen med en fuktig klut.
- Mekanisk rengjøring eller rengjøring med damp eller vann er ikke tillatt.


Kort instruksjon HANNAH 135 størrelse 1 og størrelse 2

Åpning av dørbeskyttelsen ① → ②

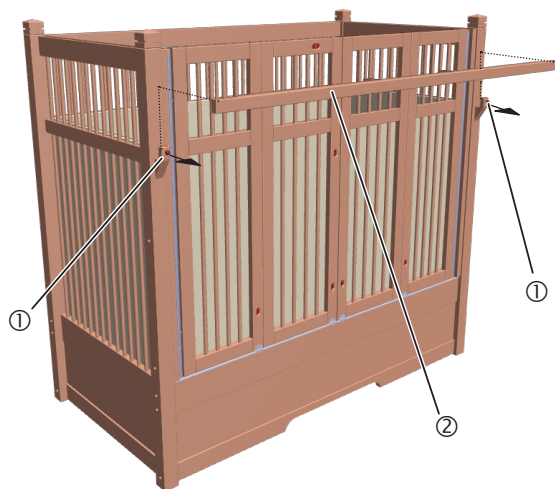

Lukking av dørbeskyttelsen ② → ①

Åpne foldedørene ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥

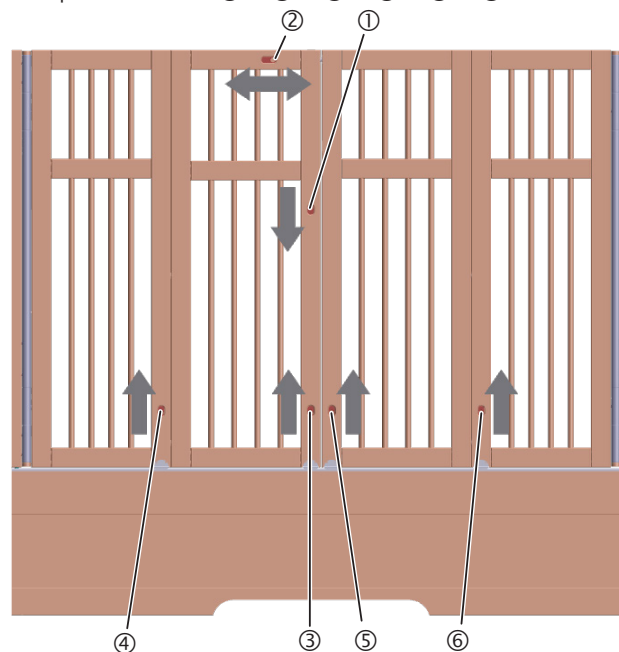

Lukking av foldedørene ⑥ → ⑤ → ④ → ③ → ① → ②