

Importør

Schuchmann AS
Gråterudveien 16A
3036 Drammen

Phone: +47 32 88 48 00
www.schuchmann.no

Produsent

KayserBetten GmbH & Co. KG
Rieper Straße 12

D- 29683 Bad Fallingbostal GERMANY
Phone: +49 5163-6595

info@kayserbetten.de • www.kayserbetten.de

Kort instruksjon IDA Crib SK

Sikkerhetsinstruksjoner

- Vedlikehold / sikkerhetskontroll en gang i året
- Pleieseng for hjemmebruk og klinisk bruk med tørt interiør
- Ved barn uten tilsyn må pleiesengen være i laveste posisjon, gitteret må være lukket og låst og de elektriske funksjonene må være blokkert (nøkkel/håndkontroll)!
Den manuelle bryteren må være festet til oppbevaringsposisjonen. (se merking)
- Maksimal pasientvekt er 50 kg
- Trekk ut støpselet før sengen flyttes.
- Ved bruk av justeringsfunksjonene må det ikke befinne seg noen gjenstander eller kroppsdeler fra andre personer i bevegelsesområdet av sengen
- Ved bruk av justeringsfunksjonene må det ikke befinne seg flere personer i sengen.
- Hvis sengen er utstyrt med hjul, må sengen sikres mot å bevege seg ved å låse hjulene.



Lagringsposisjon
for manuell bryter

Advarsel om EMC

De elektriske drivenhetene oppfyller de vesentlige beskyttelseskravene som er nevnt i retningslinjene i veiledningen. for innstillingen av medlemslandenes forskrifter for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (86/336/EØF). Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at det under visse omstendigheter oppstår en gjensidig forstyrrelse, spesielt ved bruk av mobiltelefoner, mellom elektriske apparater.

Vedlikehold og desinfisering

- For rengjøring av barnesengen er alle husholdningsrengjøringsmidler uten ammoniakk og skrubbemidler tillatt.
- **OPPMERKSOMHET:** Tørk av sengen med en fuktig klut. Elektriske motorer og manuelle brytere må beskyttes mot fuktighet.
- Mekanisk rengjøring eller strålerengjøring med damp eller vann er ikke tillatt.

Importør

Schuchmann AS
Gråterudveien 16A
3036 Drammen

Phone: +47 32 88 48 00
www.schuchmann.no

Produsent

KayserBetten GmbH & Co. KG
Rieper Straße 12

D- 29683 Bad Fallingbostal GERMANY
Phone: +49 5163-6595


info@kayserbetten.de • www.kayserbetten.de

Kort instruksjon IDA Crib SK


- 1 Liggeflate opp
- 2 Liggeflate ned



Sett den blå nøkkelen til håndkontrollen i knappen på baksiden av håndkontrollen for å låse eller låse opp tastaturenheten.

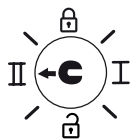

Åpne foldedørene ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥

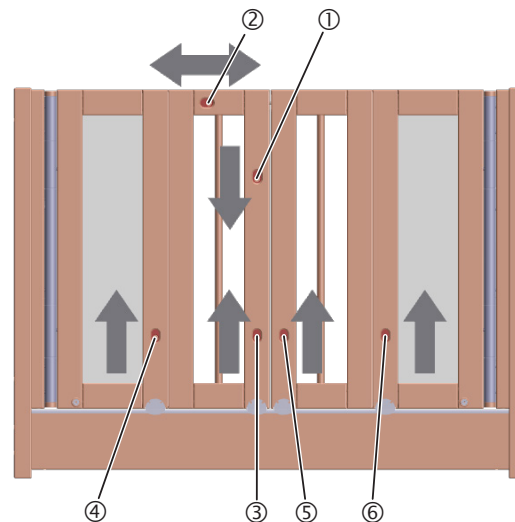

Lukking av foldedørene ⑥ → ⑤ → ④ → ③ → ① → ②