



Montere overmadrassen eller madrasserstatningen og pumpen

1

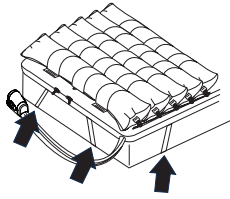

- slangesett i fotenden
- HLR i hodeenden
- cellene vender opp

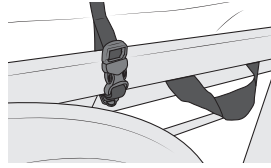

Overmadrass:

Legges på basemadrassen.
Fest med fire festeremmer.

Madrasserstatning:

Legges på sengebunnen. Fest de 8 festeremmene til de bevegelige delene på sengerammen (+3 i hodeenden kun for Auralis Plus)

2


arjo

Auralis




Lukk beskyttelsestrekket over madrassen med glidelåsen. Arjo-logoen er synlig i fotenden.

3

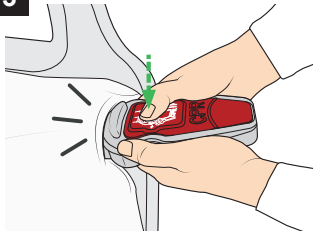


HLR-enheten klikkes i lukket stilling.

4

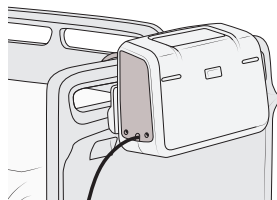


Heng pumpen i fotenden av sengen.

5

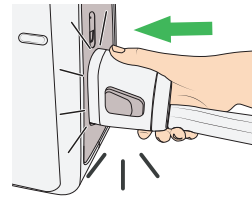

Koble til slangesettet.


6

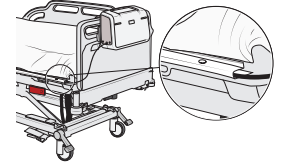

Plasser kabelen i kabelstyringen. Lukk klaffen rundt kabelen med trykkpinnene.
Koble strømkabelen til en strømkilde.


Montere seteputen og pumpen

1

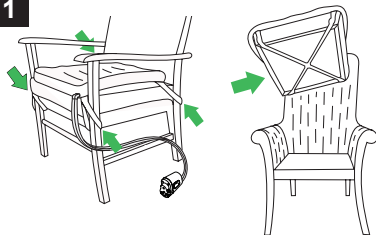


Setepute:

Legg den på stolens overflate.
Bruk festeremmene til å feste den.

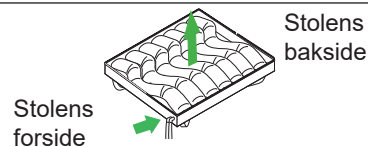

- cellene vender opp
- slangesett foran i høyre hjørne
- celle horisontalt over stolen, V-form vendt fremover


2

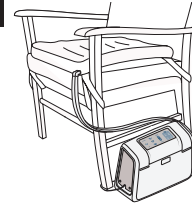


Sett pumpen på gulvet, legg kabelen under stolen og slangesettet langs stolen.
Koble til slangesettet.
Koble strømkabelen til en strømkilde.

Starte Auralis-systemet

1

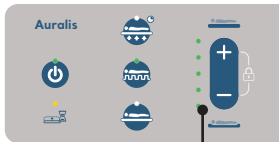

10 s.

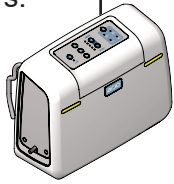

Når pumpen er koblet til en strømkilde, kjører den en egenesjekk: Pipesignal – 10 sekunder – 2 pipesignaler – klar til bruk.

Hold inne Kjør/standby-knappen.

Følgende indikatorer vises:

- Kjør/standby
- Venteindikator
- Knapp for alternerende modus
- Komfortkontrollindikator
- Batteriindikator
- Grønne indikatorer foran på pumpen

2



15 min


Legg lakenet på madrassen når Vent-indikatoren slås av. Pass på at HLR-hurtigtømmeenheten er godt synlig.

Legg pasienten på madrassen eller seteputen.

Alternerende modus er valgt som standard.


HLR-hurtigtømmeenhet

1

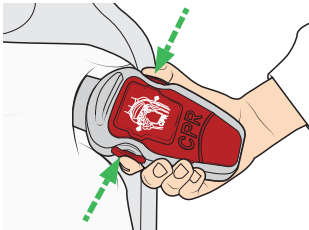


Aktivere: Trykk på begge HLR-utløserknappene samtidig.

2

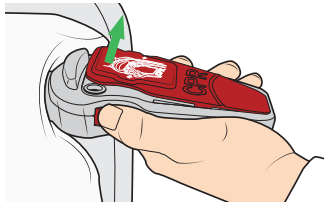


Pass på at den fremre delen er åpen. Luften tømmes raskt.

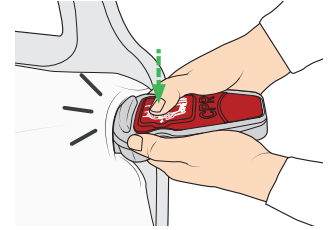

Tilbakestille: Trykk ned den åpne delen til den klikker på plass i lukket posisjon.

AutoFirm-modus


1

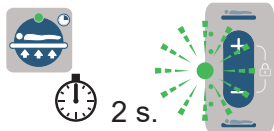

Aktivere: Trykk og hold inne knappen.

Komfortindikatorene blinker, og madrassen blåses opp til AutoFirm.

2

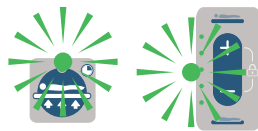

Trykk oppnådd – AutoFirm og Kontroll-komfortindikatorene skifter til konstant lysende.



2 s.

Deaktivere: Hold inne knappen eller velg en annen modus.



Forleng: Trykk på knappen for å forleng med 5 minutter. Maks. 30 minutter

Hvis den ikke forlenges, går pumpen tilbake til forrige modus.

Alternerende modus, standardinnstilling



Aktivere:

Trykk på knappen. Indikatoren for alternerende modus vises.

Tilstøtende celler blåses opp og tømmes i en syklus på 10 minutter.



Deaktivere:

Velg Reaktiv KLT- eller AutoFirm-modus.

Hvis det ikke trengs mer behandling, fjerner du pasienten fra overflaten og slår av pumpen.

Reaktiv KLT-modus



Aktivere:

Trykk og hold inne knappen.

Indikatoren for Reaktiv KLT-modus vises.




Deaktivere:

Velg Alternierende modus eller AutoFirm-modus.

Hvis det ikke trengs mer behandling, fjerner du pasienten fra overflaten og slår av pumpen.

Sperremodus

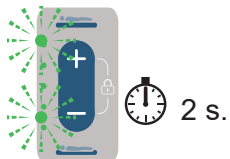


Låse:

Hold inne begge komfortregulatorknappene samtidig.

Komfortkontrollindikatoren blinker.

Pumpen er nå låst.

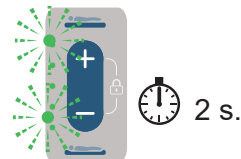


Låse opp:

Hold inne begge komfortregulatorknappene samtidig.

Komfortkontrollindikatoren blinker.

Pumpen er nå låst opp.


Transportmodus (kun madrasser)

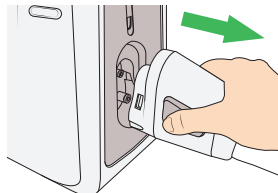

Aktivere:

Trykk på sideknappene samtidig, og fjern slangesettet.

Madrassen støtter pasienten i opptil 12 timer.

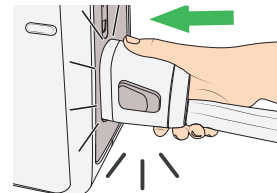

Deaktivere:


Koble til slangesettet igjen.

Pumpen går tilbake til forrige modus.

Blåse opp og tømme polstringen (kun Auralis Plus)

Polstringskonfigurasjoner:

- Én polstring oppblåst (venstre eller høyre)
- Begge polstringene oppblåst (venstre og høyre)
- Begge polstringene tømt for luft (venstre og høyre)

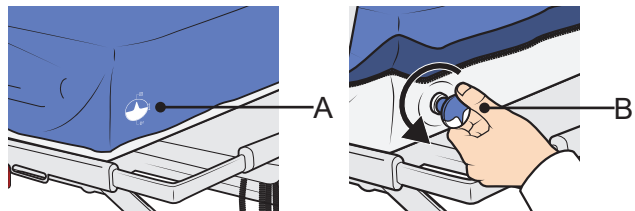

Risiko for personskade eller ubehag
Deaktivere transportmodus

Blåse opp polstringen:


Finn ventilsymbolet (A).

Drei ventilen (B) på polstringene helt mot klokken.

Gjenta om nødvendig på den andre polstringen.

La dem blåses opp i 8 minutter.

Merk: Utvidet sengerammebredde før polstringene blåses opp.

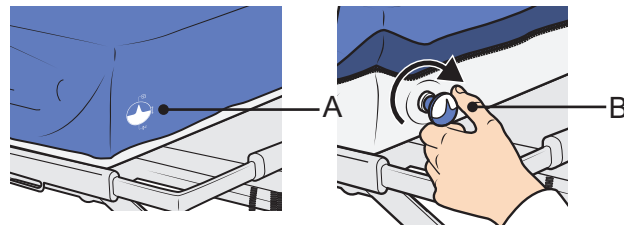

Tømme polstringen:

Finn ventilsymbolet (A).

Drei ventilen (B) på polstringen helt med klokken.

Gjenta om nødvendig på den andre polstringen.

La den tømmes i 5 minutter.

Merk: Tøm polstringene før sengerammens bredde reduseres.

