















Hurtigguide

 Power	Slå pumpen på/av
 Låsefunksjon	Når den grønne dioden lyser, er panelet låst. For å låse/låse opp, trykk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lyset slås på/av. Panelet låses når det ikke har vært brukt på 3 min.
 Syklus	Her kan du velge mellom syklustid på 5, 10, 15 minutter. Lysdioden på pumpen indikerer gjeldende innstilling.
 Auto Firm	Funksjonen brukes til pleie/mobilisering. Madrassen blir hard/statisk. Slår seg automatisk av etter 20 minutter og går tilbake til forrige innstilling. For å slå av funksjonen selv, trykk på Auto Firm-knappen igjen.
 Trykkinnstilling	Reguler trykket i madrassen basert på brukerens vekt – trykk på «auto adjust» ved ny bruker – trykket er ferdig innstilt når kun er ett lys er synlig.
 Komfortinnstilling	<p>«0» er trykket systemet automatisk finner.</p> <p>«+1, +2» er et høyere trykk = fastere madrass.</p> <p>«-1, -2» er et lavere trykk = mykere madrass.</p>
 Terapivalg  Seat inflate	<p> «Alternating»: dynamisk funksjon. Systemet vil endre trykket i cellene hvert 5., 10. eller 15. minutt.</p> <p> «Static»: Statisk funksjon. Madrassen er stillestående med samme trykk i alle celler.</p> <p> «Seat inflation»: Setefunksjonen gir brukeren ekstra støtte i sittende stilling (f.eks. å spise)</p>
 Alarm	Ved å trykke på alarmknappen, dempes alarmer (lydløs).

Feilsøking

Lavt trykk	Lavtrykkslampen lyser ved siden av dette symbolet: 
Årsak	CPR-ventilen kan være utløst/vridd eller det er lekkasje i madrassen.
Løsning	Steng CPR-ventilen eller sjekk mulig lekkasje i madrassen eller lekkasje i celle/luftslange. Kontroller at slangene er godt festet til pumpen. Kontakt Varodd Velferdsteknologi hvis problemet ikke kan løses.

Strømsvikt	Strømbruddlampen lyser ved siden dette av symbolet: 
Årsak	Feil i strømforsyningen, stikkkontakten er slått av, ledningen er frakoblet eller pumpen er slått av.
Løsning	Sett ledningen i stikkkontakten eller pumpen. Sørg for at pumpen er slått på.

Hjertestans, HLR	Finn den gule CPR-stroppen som er på siden av madrassen i hodeenden.
Løsning	Trekk i CPR-stroppen slik at luften tømmes fra madrassen. Slangene kan også kobles fra pumpen for å tømme madrassen raskere.