

UPPSTART

1. Placera madrassen direkt på sängbotten, häng pumpen vid fotändan.
2. Anslut pumpen till eluttag och luftslangarna till madrassen.
3. Starta pumpen. (Knappen finns vid pumpens elanslutning).
4. När Ready-lampen tänds kan madrassen sättas i bruk.



READY LAMPA

Når denne lampen lyser er madrassen klar for bruk.



VEKSLING & FREKVENS

Velg tid for hver veksling (trykk gjentatte ganger) samt aktiver **dynamisk** program.



STATISTISK PROGRAM Når denne er aktiv er systemet i **statisk** modus.



STELLFUNKSJON Når denne er aktivert er madrassens trykk på det maksimale.



SITTEFUNKSJON Lufttrykket går noe opp for å gi bedre støtte når sittende.



KEY LOCK

Tastelås; hold inne i 5 sek.



KOMFORT

Fra myk til hard, hvor **-1** er myk, **0** er anbefalt (fabrikkinnstilling), og velg **+1** eller **+2** om det foretrekkes et hardere mottrykk i madrassen.



MUTE ALARM

Trykk på denne for å slå av lyd ved alarm.



LAVT LUFTRYKK

Lampen lyser om lufttrykket synker (har en delay på 20 min).



ELEKTRISKT FEIL

Lampen lyser om feil på strømtilførsel.

ON/OFF-KNAPP PÅ PUMPENS HÖGRA SIDA

