

Singly Air E hurtigveiledning

Slik bruker du elsykkelen din

1. Trykk på (av/på)-knappen på batteriet for å slå på E-systemet.



2. Juster setet og sett deg på sykkelen.



3. Slå på displayet ved å holde inne (av/på)-knappen på fjernkontrollen på styret.



4. Løsne parkeringsbremsene.



5. Velg ønsket støttenivå (1-9).



6. Begynn å tråkke, systemet vil støtte etter en kort forsinkelse.



For å slå på lysene trykker du på (+)-knappen på fjernkontrollen og holder den inne til displayets bakgrunnsbelysning og lysene slås på.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no