

# Easy 22 hurtigveiledning

## Slik bruker du elsykkelen din

1. Trykk på (av/på)-knappen på batteriet for å slå på E-systemet.



2. Juster sadel og styre.



3. Lå på displayet ved å holde inne (av/på)-knappen på fjernkontrollen på styret.



4. Hold sykkelen og skyv stativet bakover. Sett deg på sykkelen.



5. Velg ønsket støttenivå (1-9).



6. Begynn å tråkke, støtten aktiveres etter en kort forsinkelse.



For å slå på lysene trykker du på (+) -knappen på displayet og holder den inne til displayets bakgrunnsbelysning og lysene slås på.



**Sunrise Medical AS**

Delitoppen 3

1540 VESTBY

**T: 66 96 38 00**

**E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)**

**[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)**